

ガッタパーチャ オブチュレーター

【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

- 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者〔過敏性の症状を発症する恐れがあるため〕

【形状・構造及び原理等】*

【形状】

本品は、円柱状の熱可塑性ガタパーチャである。

【種類、寸法】

種類：ミディアム

標準寸法：15 mm×φ 2.5 mm

標準重量：0.22 g/個

【体に接触する部分の主な組成】

ガタパーチャ、酸化亜鉛、硫酸バリウム

【原理】

本品を加熱して可塑化し、根管へ充填した後に冷えて硬化する。

【使用目的又は効果】

歯の根管の充填に用いる。

【使用方法等】

本品の使用にあたっては、歯科根管材料電気加熱注入器の取扱説明書および添付文書を使用前に必ず読むこと。

【使用方法】

- (1) 通法により、根管拡大・形成を行う。
- (2) 根管内を洗浄し乾燥させた後、シーラー等の根管充填材料を根管壁面に薄く塗布する。
- (3) 予め、注入器を160℃～200℃に設定する。
- (4) 本品を注入器にセットし、加熱、可塑化させる。（注入器の加熱チャンバー内で本品を加熱し、可塑化させる。）
- (5) 根尖部封鎖のために、根管内に少量の本品を注入し、根尖にアピカルプラグを設ける。
- (6) 注入器から本品が押し出されると硬化が始まるので、プラー等を用いて本品を押し固め、根尖を封鎖する。
- (7) 垂直加圧法により、本品を注入し、根管全体の充填を行う。（他の方法で根尖を封鎖した場合も同様に、その後本品を注入し、根管上部まで充填を行い圧接する。）
- (8) 加熱したプラー等インストルメントで、ガタパーチャを圧接する。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- (1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】**

【保管の条件】

直射日光を避け、密閉容器に入れ室温（10～30℃）で保管すること。

【有効期間】

製造日より4年〔自己認証（外国製造業者データ）による。〕
容器又は表示ラベルに記載の※使用期限までに使用すること。

※ 砂時計マーク（17）□□△△○○は、使用期限□□年△△月○○日を示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：ダイアデントグループ・インターナショナル
Diadent Group International

国名：大韓民国

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com