

コンポジット 3D リングフォーセップス

【形状・構造及び原理等】**/*

【形状・構造】

歯科用マトリックスリテーナの着脱時にリングを開閉させる2つのアーム部、把持部及びストッパー部からなる。本品には下図の3種類があり、フュージョンとフュージョン V2は作業部の形状が異なる。



フュージョン



フュージョン V2

【体に接触する部分の主な組成】

ステンレス鋼

【原理】

2つのアームの先端部を歯科用マトリックスリテーナに引っ掛け、把持部を握ることにより歯科用マトリックスリテーナを広げる。


【使用目的又は効果】

口腔内で充填材又は修復材を適用するために用いる。Ⅱ級窩洞充填時の隔壁となるマトリックスバンドを所定の位置に保持するための専用のリテーナを着脱させる際に、リテーナのリングを開閉させるために用いる。

【使用方法等】**/*

【使用方法】

- (1) 本品を用いて、リテーナのリングを広げ、リテーナの脚部を歯間部の適切な位置に装着させる。

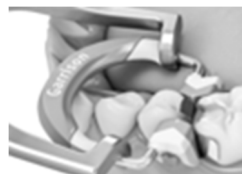

フュージョン

フュージョン V2

【保守・点検に係る事項】

【洗浄】

- (1) ナイロンブラシを使用し、ワイヤブラシ等は使用しないこと。
- (2) 洗浄中は、材質の異なる金属製器具との接触を避けること。

【消毒】

- (1) アルコール、アセトン、ケトンを含む消毒剤は使用しないこと。

【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件(日本薬局方による): 115~118℃ 30分間
121~124℃ 15分間
126~129℃ 10分間
- (2) 137℃以上に加熱しないこと。
- (3) 滅菌中は、材質の異なる金属製器具との接触を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: **株式会社モリタ**

電話番号: 06-6380-2525

外国製造業者: ギャリソン・デンタル・ソリューションズ
Garrison Dental Solutions

国名: アメリカ合衆国

【お問い合わせ先】

問合せ窓口: 株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号: 0800-222-8020 (無料)

Fax番号: 0800-222-6480 (無料)

E-mail: e-customer@morita.com