

ストラタ G バンド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

- 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者

<使用方法>

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

[形状・種類]

本品は、歯牙の豊隆に沿うように、あらかじめ 3 次元カーブが付与されており、表面にはコーティング加工が施されている。

形状	種 類	サイズ
	① 小児用	3.5×12.0 mm
	② スモール	4.5×12.0 mm
	③ セミスタンダード	5.5×12.0 mm
	④ スタンダード	6.5×12.0 mm
	⑤ ラージ	7.5×12.0 mm

【体に接触する部分の主な組成】

ステンレス鋼、フッ素樹脂

[原理]

歯の隣接面に挿入し、所定の位置につけることにより、Ⅱ級窩洞部の立体的な隔壁を形成する。



【使用目的又は効果】

口腔内で充填材又は修復材に一般的輪郭を与え、修復材等を閉じ込めるために用いる。修復する歯の形状のほか、隣接歯の位置に応じて適切な形になるよう輪郭を付与する。歯科用マトリックスリテーナーとの併用により、Ⅱ級窩洞部に立体的な隔壁を形成する。


【使用方法等】

[使用方法]

- 通法に従い、ラバーダムを装着し、防湿する。
- 通法に従い、窩洞を形成する。
- 歯冠の高さに応じて本品を選択する。
- ピンセット又はマトリックスフォーセップス（別売品）を用いて中央のタブ（四角のつまみ）を咬合面方向に向け、頬側又は舌側からスライドさせながら隣接面へ挿入する。
- 窩底部のマージン部の封鎖と歯間離開のために適切なサイズのウェッジ（別売品）を歯間空隙に挿入し、固定させる。固定が緩い場合は、低粘度のフロアブルレジンを窩底部へ充填すると本品が元の位置からずれる可能性がある。その際にはウェッジのサイズを大きくして調整すること。

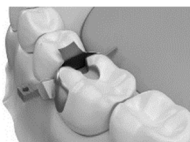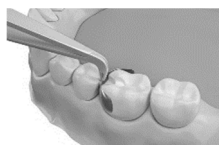

- 専用のリングフォーセップス（別売品）を用いて、リテーナー（別売品）を広げ、脚部をウェッジの上部に装着させる。リテーナーの脚部が、なるべく本品に接触するように装着する。
- 本品のタブを隣在歯の咬合面側に折る。
- 本品を隣接面へとパーニッシュし、コンタクトを形成する。
- 通法に従い、歯面処理した後、コンポジットレジンを充填する。
- 充填後は、装着の逆順（リテーナー、ウェッジ、本品）に撤去する。

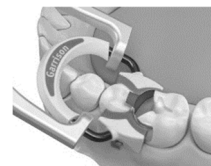

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 本品は、必ず口腔内にラバーダムを装着してから使用すること。〔誤飲を防ぐ〕

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- 誤飲には十分注意すること。

【保守・点検に係る事項】

[滅菌]

- 安全な使用のために、使用前に高压蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間
- 137℃以上に加熱しないこと。
- 滅菌中は、材質の異なる金属製器具との接触を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：ギャリソン・デンタル・ソリューションズ
Garrison Dental Solutions

国名：アメリカ合衆国

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com