

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ 16370000

ストラタG ウェッジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

- 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者


<使用方法>

- 再使用禁止。
- 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]

本品は、本体とフィンからなる。

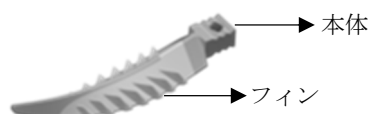

[種類]

本品には、以下の種類がある。

- ① エクストラスモール（イエロー）
- ② スモール（ブルー）
- ③ ミディアム（オレンジ）
- ④ ラージ（グリーン）



[体に接触する部分の主な組成]

本体：ガラス充填ポリプロピレン
フィン：熱可塑性エラストマー

[原理]

本品を歯頸部に設置し、歯をわずかに分離させる。

【使用目的又は効果】

充填物の挿入時に歯をわずかに分離させるため歯頸部に設置するのに用いる。歯間を分離しつつ、マトリックスバンドの適合を補助するために使用することもできる。

【使用方法等】

[使用方法]

- (1) 適切なサイズの本品を選択する。
- (2) マトリックスバンドに圧接するように歯間部に差し込み、設置する。
- (3) 充填後、ピンセット等を用いて本品を除去する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- (1) 本品は、必ず口腔内にラバーダムを装着してから使用すること。[誤飲を防ぐ]
- (2) 歯又は歯列の形態により、本品を確実に固定できない場合は、無理に使用しないこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- (1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- (2) 誤飲には十分注意すること。

【保守・点検に係る事項】

[滅菌]

- (1) 安全な使用のために、使用前に高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：
115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間
- (2) 137℃以上に加熱しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：ギャリソン・デンタル・ソリューションズ
Garrison Dental Solutions

国名：アメリカ合衆国

[お問い合わせ先]

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com