

機械器具 50 開創又は開孔用器具  
一般医療機器 歯科用開口器 70949000

## スキャンメイト

### 【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

- 熱可塑性エラストマー、複合ポリプロピレンに対してアレルギー反応を起こしやすい患者[アレルギー反応を起こす恐れがある]

### 【形状・構造及び原理等】

#### 【形状・構造】

本品は作業部及びハンドル部からなる。本体内部の構造により、作業部内のネックの角度を変更できる。



#### 【サイズ】

全長 186.5mm

#### 【体に接触する部分の主な組成】

熱可塑性エラストマー、複合ポリプロピレン

#### 【原理】

本品の作業部で患者の口角、口唇、舌及び粘膜を排除し、開口状態を保持する。

### 【使用目的又は効果】

歯科治療で患者の開口状態を保持する。

### 【使用方法等】

#### 【使用方法】

- ハンドル部を把持する。
- 作業部で開口状態を把持する。

#### 口腔内スキャナー（デジタル印象採得装置）と併用する場合

- 開口状態に応じてネックを曲げて使用する。

#### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 使用前に損傷、摩耗、劣化していないか確認すること。
- ネックは 60 度以上曲げないこと。

#### 【その他の注意】

- 滅菌処理及び繰り返しの使用により劣化するので、適宜交換すること。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 【洗浄】

- 酵素系もしくは類似の洗浄剤で洗浄すること。

#### 【消毒】

- 強アルカリ性及び強酸性の消毒剤は使用しないこと。

#### 【滅菌】

- 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。  
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：  
115～118℃ 30 分間  
121～124℃ 15 分間  
126～129℃ 10 分間
- 136℃以上に加熱しないこと。
- 滅菌の耐用回数は 30 回のため、それを超えて使用しないこと。[損傷、摩耗、劣化するため]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：Dongguan Rongchangsheng Aerospace  
Technology Co., Ltd.

国名：中華人民共和国

#### 【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com