

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー 16350000

オゾンステンレス印象トレー

【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

- 本品の材質（ステンレス、ニッケル）に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある患者

＜使用方法＞

- 本品の材質（ステンレス、ニッケル）に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある医療従事者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品は、印象材を盛るトレー部及びその支台となる把持部からなる、穴あきタイプの印象採得用トレーである。

【サイズ・種類】

形 状 ・ 種 類		サイズ	使用部位
有歯顎用		U-XL	特大
		U-L	大
		U-M	中
		U-S	小
		L-XL	特大
		L-L	大
		L-M	中
		L-S	小
局部用		PA	上顎前歯部用
		PB	下顎前歯部用
		P1	臼歯部用
		P2	

【体に接触する部分の主な組成】

ステンレス鋼

【原理】

本品に印象材を盛り、歯に圧接することにより歯型を採取する。より正確な印象採得のため、トレー部に小さな穴が付与されている。

【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するのに用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) トレー部に印象材を盛る。
- (2) 印象対象の歯列部分に圧接し、印象採得する。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- (1) 本品の使用により、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた患者及び医療従事者は使用を中止し、医師に相談するなど適切な処置を施すこと。

【保守・点検に係る事項】

【洗浄】

- (1) トレーに付着した印象材は、軟毛ブラシ等により除去すること。
- (2) 金属素材のブラシで擦って洗浄しないこと。
- (3) 中性のトレークリーナーを使用すること。
- (4) 材質の異なる金属製器具と一緒に浸漬・洗浄しないこと。
- (5) 流水下ですすぎを十分に行うこと。[トレークリーナー等が残っていると、滅菌時に変質、変色するおそれがある。]

【消毒】

- (1) 脱塩水及びフェノールを含む消毒剤等は使用しないこと。
[変質、変色するおそれがある。]

【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高压蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間
- (2) 180℃以上に加熱しないこと。
- (3) 乾熱滅菌は行わないこと。[変質・変色するおそれがある。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電 話 番 号：06-6380-2525

外国製造業者：オゾン Osung MND CO., LTD.

国 名：大韓民国

【お問い合わせ先】

問 合 せ 窓 口：株式会社モリタ お客様相談センター

電 話 番 号：0800-222-8020（無料）

F a x 番 号：0800-222-6480（無料）

E - m a i l：e-customer@morita.com