

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 自然開口向け内視鏡用くもり止め 70176000

SL クリーナー

こと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

本品は微黄色の溶液である（内容量 10mL）。

製品写真



2. 組成

水
界面活性剤
エタノール

3. 原理

本品を内視鏡のレンズ面上に塗布することにより、レンズ面上に被膜を形成して結露を防止する。

【使用目的又は効果】

自然開口部より挿入される内視鏡のレンズ面上に塗布して使用する。内視鏡と体内温度差により発生する結露を防止する。

【使用方法等】

- ① 本品のキャップを外し、1 滴内視鏡のレンズ面に滴下し、乾いた清潔なガーゼで拭き取る。
- ② 必要に応じて①を繰り返す。
- ③ 使用しないときは、キャップを閉じる。

【使用上の注意】

1. 使用前に、汚れ・破損・変形等を点検すること。
2. 本品がこぼれて目や皮膚に触れた場合は、直ちに清潔な水で洗浄すること。万一異常を感じたら、速やかに医師の診察を受けること。
3. 滅菌して使用する場合は、キャップを外し、中栓ノズルをしたまま EOG 等の滅菌を行うこと。
4. 開封使用後は、滴ビン・中栓・キャップを清潔にした後キャップを閉め、使用期限内になるべく早く使用する

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

直射日光・高温・多湿を避けて保管する。

〈使用期限〉

未開封時製造年月より 2 年、開封後 6 ヶ月以内。

（自社基準）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社杉浦研究所
東京都世田谷区玉川 4-5-4

問い合わせ先 杉研商事株式会社
東京都世田谷区玉川 4-5-4
電話 03-3708-3411
FAX 03-3700-4407