

エネマシリンジ

文書番号 A-20


【禁忌・禁止】

1. 鼻の洗浄及び浣腸用以外での使用禁止。
2. 改造の禁止。
3. 過度の加圧の禁止。
ゴム球を必要以上に加圧しないで下さい。
ノズルが抜ける恐れがあり非常に危険です。
4. ノズルを取っての使用は厳禁。

注意事項

ゴムが変色したり、ヒビ割れたり、
ノズルが抜けやすくなったら使用
できません。

【形状・構造及び原理等】

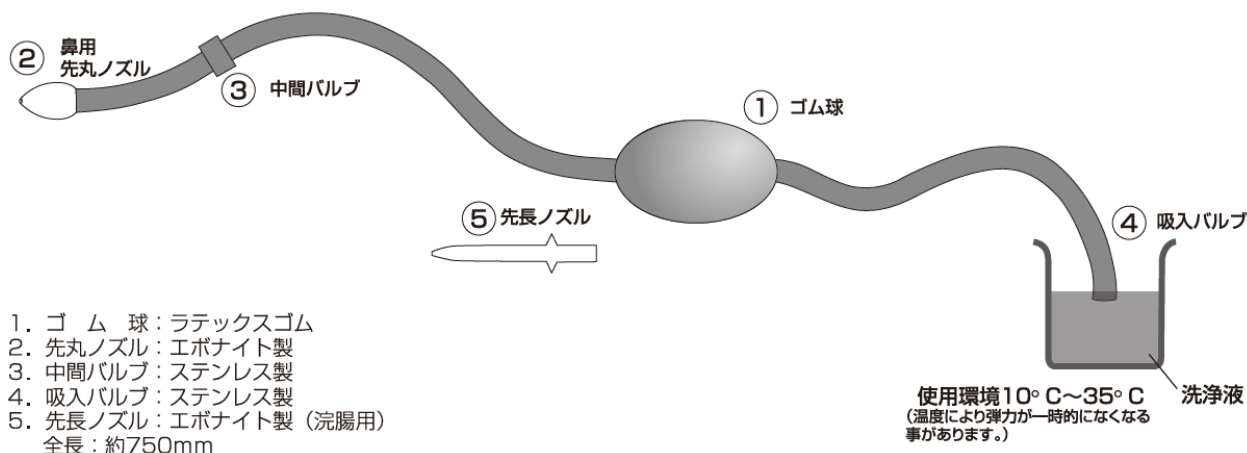

【使用目的または効果】

鼻の洗浄（個人用）、浣腸用

【使用方法等】

使用前に： 本製品は未滅菌です。使用前に数回きれいに洗ってください。
鼻洗浄の洗浄液は微温水に微量の塩化ナトリウムを使用する。

1. ④の吸入バルブのチューブを洗浄液容器の中に入れる。
2. ①のゴム球を握り、数回圧力を加える。
洗浄液がゴム球に溜まり（空気が抜けて洗浄液が溜まる）、再度加圧すると、②より洗浄液が放出される。
3. ②の先丸ノズルを鼻孔にあて、最初は口を開けて声を出しながら、ゴム球を握り少しずつ加圧する。強さは自分で調整する。するともう一方の鼻と口より洗浄液が出て洗浄されます。この時、鼻汁をかみ出します。もう一方も同様に洗浄して下さい。

使用後に：水道水等で直ちにチューブ等をよく洗い、中の水を抜き、乾燥させてください。

【保管方法及び使用期間等】


1. 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥させて下さい。
高温多湿、直射日光を避けた所で保管して下さい。
2. 使用期間は1年間 自己認証（当社データ）による。
ただしゴム部が腐食したら使用できません。

【使用上の注意】

1. 本製品は、天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発疹、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談して下さい。
2. 初めて使用する方は医療従事者に相談して下さい。
3. 医師の治療中の方は必ず医師の指示に従って下さい。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄後は直ちに乾燥させること。
2. 使用前には、必ず異常がないか点検すること。
3. 本製品を腐食させる恐れのある、漂白剤、強アルカリ液等の使用を避けること。金属たわし、クレンザー等は、表面が損傷するので使用しないこと。
4. 滅菌はガス滅菌のみ可能。
5. 洗浄液が吸入できない場合（ゴム球が戻らない状態）は吸入バルブにボールベアリングがくっついている状態なので吸入バルブをたたいて中のボールベアリングをフリーの状態にして下さい。

吸入バルブ  ← 穴をつまようじでつつくか、またはたたいてみる

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社（製造販売業者）

東京都台東区寿 1-11-11 杉山ビル

TEL：03-5830-3495 FAX：03-5830-3496