

機械器具(76) 医療用吸入器
一般医療機器 非加熱式ネブライザ(JMDN:35457000)

ネブライザーキット

【警告】

- 薬液の種類、用量、用法については必ず医師、または薬剤師等の指導に従うこと。
- 初めて使用する時や、長期間使用しなかった時は、使用前に必ず滅菌等を行うこと。
- 薬液ボトル、マウスピース等の吸入用部品は、使用者個人の物をご使用ください。部品の共用は感染症等の原因になります。
- ディスポーザブル製品は、煮沸をしないこと。
- 吸入後、残った薬液はその都度廃棄し、吸入毎に新しい薬液を使用すること。
- 吸入が終わった後はすみやかに吸入用部品を洗浄すること。洗浄後は十分に乾燥させてから清潔な場所で保管すること。
- 消毒剤で消毒した部品は、きれいな水ですすぎ洗いし、水気をよくきり、十分に乾燥させてから使用すること。
- 吸入用部品は清潔な場所で保管すること。
- 故障等によりご使用になれない場合は、すぐに医師に相談すること。

【禁忌・禁止】

- マウスピース、PVCチューブ等の吸入用部品及び吸入器本体は純正品以外は使用しないこと。
- 水道水での吸入はしないこと。
- 乳幼児やお子様の手の届くところには置かないこと。
- 最大薬液量を超える薬液を入れないこと。
- 薬液ボトル等の吸入用部品には無理な力を加えて変形させたり、ネブライザー本体内部のノズル部分をピンなどで突いたりしないこと。正しい吸入が行えなくなるおそれがあります。
- エアーコンプレッサー等器械本体や、薬液ボトル等の吸入用部品は落したり、強い衝撃を加えたりしないこと。
- 薬液ボトルに薬液を入れたまま保管または携帯しないこと。
- 薬液ボトル等の吸入用部品の乾燥は自然乾燥させること。電子レンジや食器乾燥機、ヘアドライヤー等で乾燥させないこと。
- 煮沸消毒するときは、空焚きに注意すること。

【形状・構造及び原理等】

〈形状〉

- ・ 本製品の各形状は以下のとおり。

【リユースザブル製品】

マウスピース2000



ノズルピース+L字アダプタ



マスク(小)



マスク(大)



パーフェクタ(スパーサーマスク)



ネブライザー本体2005



PVCチューブ(B)



PVCチューブ(C)



ベンチュリー管2000



だ液トラップ



【ディスポーザブル製品】

MEFAR2001(メファー2001)



〈作動原理〉

- ・ コンプレッサーにより発生した圧縮空気が、ノズルから吐出される時ノズル部と吸水管の間に生じる負圧作用によって、薬液が上部へ吸い上げられ、上部のパッフルに衝突し、細かい霧となって外部に噴出する。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

- ・薬液をネブライザーで霧状にして、その粒子を気管または鼻腔に送り、沈着させる薬物療法です。ネブライザー薬物療法は局所投与なので、薬物の投与量が少なくてすむ利点がある為、一般的に内服薬や注射に比べ、副作用の少ない治療法です。

【使用方法等】

〈使用方法〉

- ① エアーコンプレッサーに送気チューブの片側を接続し、もう一方を薬液ボトルの下部に正しく接続します。
- ② 薬液ボトルの上部を取り外し、処方された薬液を注ぎます。
薬液がこぼれるおそれがあるので、薬液ボトルを傾けないでください。
- ③ 薬液ボトルの上部を取り付け、マウスピースやマスク等の吸入用部品を接続します。
- ④ 薬液ボトルの腰部を持ち、エアーコンプレッサーを作動させます。
- ⑤ 噴霧が断続的になってきたら吸入終了の目安です。
薬液ボトルには少量の薬液が残ります。

〈使用後〉

- ・リユース可能な製品（但し、チューブは除く）
- ① すみやかに残液を捨て、きれいな水ですすぎ洗います。
 - ② [煮沸]マウスピースやノーズピース、シリコン製マスク、薬液ボトルは週に一度程度、部品を分解し温水中に浸け10分間沸騰させた後、きれいな水でよくすすぎます。
 - ③ 水気をよくきり、自然乾燥させた後、清潔に保管する。
 - ・ディスプレイ製品
- ① すみやかに残液を捨て、きれいな水ですすぎ洗浄します。
 - ② 水気をよくきり、自然乾燥させた後、清潔に保管する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・エアーコンプレッサー等器械本体は、使用前に必ず点検を行うこと。
点検や取扱い方法に関しては各機器の添付文書及び取扱説明書を参照すること。
- ・吸入用部品は、ひび割れや亀裂等の損傷がないか使用前に必ず点検を行うこと。薬液ボトルのノズル部に目詰まりがないかも確認すること。
異常が見られたら使用をせずに新しいものと交換すること。
- ・使用後はすみやかに各吸入用部品を洗浄すること。
- ・ディスプレイ製品は、煮沸をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

[保管条件]

- ・温度：-40～+70℃
- ・湿度：10～100%
- ・気圧：500～1060hPa

[耐用期間]

- | | | |
|----------------------|---|-----|
| ・マウスピース2000 | … | 6ヶ月 |
| ・ノーズピース+L字アダプタ | … | 6ヶ月 |
| ・マスク(小) | … | 6ヶ月 |
| ・マスク(大) | … | 6ヶ月 |
| ・パーフェクタ(スプレーサースマスク) | … | 6ヶ月 |
| ・ネブライザー本体2005(薬液ボトル) | … | 6ヶ月 |
| ・PVCチューブ(B) | … | 6ヶ月 |
| ・PVCチューブ(C) | … | 6ヶ月 |
| ・ベンチュリー管2000 | … | 6ヶ月 |
| ・だ液トラップ | … | 6ヶ月 |
| ・MEFAR2001(メファー2001) | … | 1ヶ月 |

※[上記耐用期間は自己認証データによる。]

【保守・点検に係る事項】

- ・必ず使用前後の点検を行い、異常が認められた時は新しいものに交換するか、販売店もしくは製造販売元に問い合わせてください。
- ・使用後は吸入用部品を洗浄・消毒し、十分に自然乾燥させた後、清潔な場所で保管してください。
- ・各吸入用部品の耐用期間を過ぎての使用はしないでください。
新しい部品と交換する際は、当社指定の純正部品を使用してください。
- ・部品の購入等の問い合わせにつきましては、販売店もしくは製造販売元に連絡してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名及び名称等】

製造販売業者：株式会社東京エム・アイ商会
住 所：東京都江東区平野3-2-6
電 話 番 号：03-6458-5588
製 造 業 者：AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l社
国 名：イタリア共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。