

機械器具(74) 医薬品注入器
一般医療機器 呼吸ガス混合器(JMDN:36327009)

レ・スペース

【警告】

- 薬剤の種類、用法及び用量については必ず医師又は薬剤師等の指導に従うこと。

【禁忌・禁止】

- 本品を複数の患者に使用しないこと。
[本品は一人の患者使用に限ります。]

【形状・構造及び原理等】

〈形状〉

- ・ 乳幼児用マスク(0~2歳) オレンジ色



- ・ 小児用マスク(2~6歳) イエロー色



- ・ マウスピース(6歳以上) マゼンタ色



- ① MDIアダプター
- ② チャンバー
- ③ マスク
- ④ マウスピース
- ⑤ 吸気バルブ
- ⑥ 呼気バルブ

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

- ・ 液体の医薬品をエアロゾルとして患者が吸入する空気の中に噴霧するために用いる機器である。

【使用方法等】

〈使用方法〉

- ① 使用する前に、本品が正しく組み立てられていること、異物が混入していないこと、及び破損や部品の欠落がないことを確認します。
- ② 定量噴霧式吸入器(MDI)をよく振り、MDIのキャップを外します。
- ③ MDIの容器をMDIアダプターに、しっかりとめ込みます。
- ④ マウスピースをしっかりと口でくわえます。マスクを使用する場合は、マスクを顔に当て空気が漏れないようにします。
- ⑤ MDIを噴霧させ、ゆっくりと口で呼吸します。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・ 本品は一人の患者のみに使用すること。
- ・ 本品を初めて使用する場合は、必ず洗浄すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・ 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

〈耐用期間〉

- ・ 本品の耐用期間は1年です。[自己認証データによる。]

【保守・点検に係る事項】

〈洗浄方法〉

- ① チャンバーからMDIアダプターを取り外します。
マスクを使用した場合は、マスクも取り外します。
- ② 中性洗剤を薄めたぬるま湯に漬け、振り洗った後、15分漬け置きます。その後清潔な水で十分にすすぎます。
- ③ 余分な水分を振り払い、各部品を自然乾燥させます。
- ④ すべての部品が完全に乾いたことを確認してから組み立てます。

〈使用前点検〉

- ・ 本品に破損等がないかを確認すること。破損等があった場合は使用しないで、直ちに新しい製品と交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名及び名称等】

製造販売業者:株式会社東京エム・アイ商会

住 所:東京都江東区平野3-2-6

電 話 番 号:03-6458-5588

製 造 業 者:AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.社

国 名:イタリア共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。