

2021年4月8日作成(第一版)

取扱説明書

製造販売届出番号:11B3X10017000022

機械器具75 脱疾治療用器具
一般医療機器 脱疾治療用ストラップ 30883000

骨盤底筋ベルト モレナレディ


ご使用前に必ずお読み下さい。

【禁忌・禁止】

骨盤臓器脱(膀胱瘤、子宮脱、直腸脱等)の治療、妊娠中や出産直後で通院中の方は、ご使用前にかかりつけの医師に相談し、医師の指示に従ってご使用下さい。

【形状・構造及び原理等】

(形状)

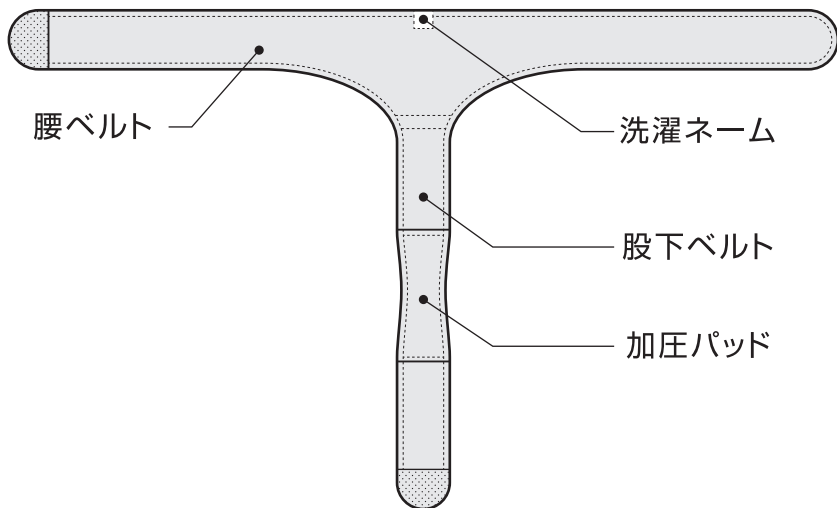

(原理)

腰ベルトを装着し、股下ベルトを腰ベルトのお腹側へ引き上げて面ファスナーで固定。股下ベルトと加圧パッドが膀胱瘤により下垂した臓器を正常な位置に保持し、症状を改善・予防する。


〈使用目的又は効果〉

下垂した膀胱を正常な位置に保持し、頻尿や尿漏れを伴う膀胱瘤の症状を改善・予防する。

(素材)

ナイロン、ポリエステル、綿、ポリウレタン


【使用方法】下着やスパッツの上に着用します。

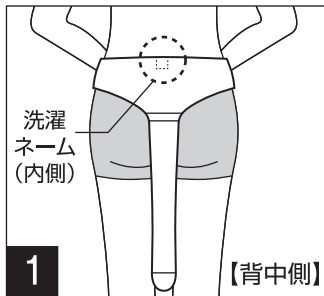

洗濯ネームを身体の真後ろに合せて下さい。



おへそ周りに腰ベルトを装着します。

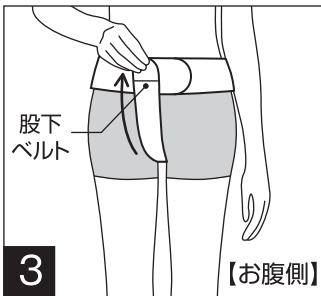

股下ベルトを股下に圧が加わるように引き上げながら、腰ベルトのお腹側へ装着します。

※股下ベルトが腰ベルトに届かなかったり、余った場合は、腰ベルトの装着する位置を上下して調節して下さい。

【使用上の注意】

- 初めのうちは1～2時間程度の短い時間でご使用いただき、痛みやかゆみ等の異常が無いが確認して、徐々に使用時間を長くして下さい。
- 使用中、または使用後に痛みやかゆみ等の異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、専門医にご相談下さい。
- 本品は女性用です。
- 就寝中は使用しないで下さい。
- 本来の目的以外では使用しないで下さい。
- 汚れた場合は手洗いをして下さい。漂白剤は使用しないで下さい。乾燥機のご使用はお避け下さい。直射日光には当てず必ず陰干しをして下さい。長時間水に浸さないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光や高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
- 面ファスナーの付きが弱くなったら買い替えが必要です。

【保守・点検に係る事項】

- 着用前に破れやほつれが無いが確認して下さい。

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売業者】株式会社サクサン
埼玉県川越市砂新田80-38
TEL:049-246-1232

【商品についてのお問い合わせ先】

株式会社オリジナルオファー
愛知県清須市春日須ヶ田85
TEL:052-408-2131