

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000
クイックバン

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本製品は、アクリル系接着剤を使用した
アセテートテープと不織布パッドで構成された医療用
絆創膏です。

エチレンオキサイドガスによる滅菌処理済みです。

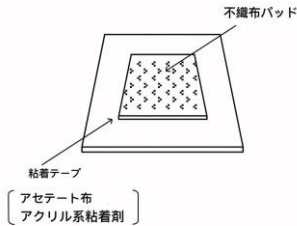

タイプ	総サイズ(パッド部分)
Sサイズ	20mm × 20mm (8mm × 8mm)
Mサイズ	27mm × 27mm (13mm × 13mm)

【使用目的又は効果】

注射、採血、点滴、関節穿刺などの処置後の
穿刺部位や傷口の保護

【使用方法】

- 貼付箇所を十分に清浄にしてください。
- 保護シートを取り除き、処置部位にパッドを
当てて貼り付けてください。
- 貼付後は、しばらく軽く押さえて密着させて
ください。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

本製品の使用により皮膚に異常(発疹、赤み、痒みなど)が
現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

2.その他の注意事項

- 滅菌包装に損傷や汚れ、水濡れがある場合は使用しない
でください。
- 使用中は水などで濡らさないようにしてください。
- 使用中に汚れたり濡れたりした場合は、新しいものに
交換してください。
- 使用中に裏面に血液や分泌液が染み出した場合は、
新しいものに交換してください。
- 剥がす際は、皮膚を傷つけないよう慎重に行ってください。

【保管方法と有効期間】

1.保管方法

湿気を避け、高温多湿、直射日光を避けて常温で保管して
ください。

2.有効期間

3年間(自社検証による)
使用期限は外箱に明記

【製造販売業者情報】

製造販売:CGM Innovation株式会社

【お問い合わせ先】

CGM Innovation株式会社

〒136-0071東京都江東区亀戸3丁目24番7号

TEL: 03-6811-2345

受付:平日10:00～18:00