


器(02)医療用照明器

一般医療機器 汎用光源 JMDN 32037000

ウェルチ・アレン 耳鼻鏡

*【形状・構造及び原理等】

本製品は、耳鏡ヘッド、スペキュラ、ハンドルから構成されます。

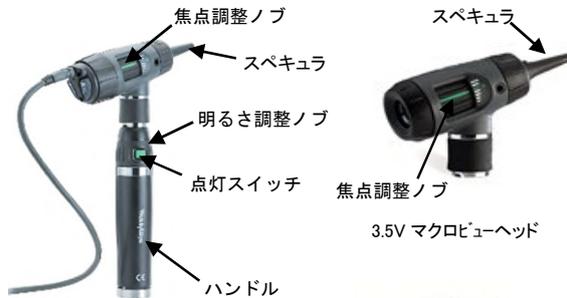

ウェルチ・アレン耳鼻鏡
デジタルマクロビュー



3.5オペレーティング型耳鏡ヘッド

3.5V診断型耳鏡ヘッド



ウェルチ・アレン耳鼻鏡
ポケットスコープ耳鏡



3.5ニューマチック型耳鏡ヘッド



ウェルチ・アレン耳鼻鏡
ポケットジュニア耳鏡



・ウェルチ・アレン耳鼻鏡
ポケットLED耳鏡
・ウェルチ・アレン耳鼻鏡
ポケットプラスLED耳鏡



ハンドル



スペキュラ



マクロビューベーシック



マクロビュープラス

仕様

- (1) 照明系
 - ・3.5V ハロゲンライト
 - ・3.5VLED ライト(ポケットLED耳鏡、ポケットプラスLED耳鏡のみ)
- (2) 電池
 - ・単3型アルカリ電池(2本)
 - (ポケットスコープ耳鏡、ポケットジュニア耳鏡、ポケットLED耳鏡、ポケットプラスLED耳鏡のみ)
- (3) 充電電池
 - ・3.5V ニッケル充電電池または3.5V リチウムイオン充電電池
 - (マクロビュー、デジタルマクロビュー、3.5V診断型耳鏡、3.5Vオペレーティング型耳鏡、3.5Vニューマチック型耳鏡、マクロビューベーシック、マクロビュープラスのみ)

本製品の種類

製品名	耳鏡ヘッド	スペキュラ	ハンドル
ウェルチ・アレン耳鼻鏡 マクロビュー	3.5V マクロビュー ヘッド	有	・3.5V リチウムイオン 充電式ハンドル ・3.5V ニッケル充電 式ハンドル
ウェルチ・アレン耳鼻鏡 デジタルマクロビュー	3.5V デジタルマク ロビューヘッド	有	
ウェルチ・アレン耳鼻鏡 3.5V診断型耳鏡	3.5V 診断型耳鏡 ヘッド	有	
ウェルチ・アレン耳鼻鏡 3.5Vオペレーティング型 耳鏡	3.5V オペレーティ ング型耳鏡ヘッド	有	
ウェルチ・アレン耳鼻鏡 3.5Vニューマチック型耳 鏡	3.5V ニューマチック 型耳鏡ヘッド	有	
ウェルチ・アレン耳鼻鏡 マクロビューベーシック	マクロビューベーシ ックヘッド	有	
ウェルチ・アレン耳鼻鏡 マクロビュープラス	マクロビュープラス ヘッド	有	
ウェルチ・アレン耳鼻鏡 ポケットスコープ耳鏡	耳鏡とスペキュラ合体タイプ		ハンドル
ウェルチ・アレン耳鼻鏡 ポケットジュニア耳鏡	耳鏡とスペキュラ合体タイプ		ハンドル
ウェルチ・アレン耳鼻鏡 ポケットLED耳鏡	耳鏡、スペキュラ、ハンドル合体タイプ		
ウェルチ・アレン耳鼻鏡 ポケットプラスLED耳鏡	耳鏡、スペキュラ、ハンドル合体タイプ		

【使用目的又は効果】

本品は、患者の外耳道または鼻腔に強い光を当てて、治療又は観察することを目的とします。

【使用方法等】

- 1) ハンドルの点灯スイッチがオフ状態であることを確認してください。
- 2) ヘッドをハンドルの取り付け部に垂直に装着し回転させて固定します。イルミネーター付タイプのヘッドは、ハンドル接続部とヘッド上部が、ねじ式で分離可能ですので、確実に接続部が取り付けられていることを確認してください。
- 3) ハンドルの点灯スイッチを操作し、照明光を点灯させスイッチの回転により適切な明るさに調節してください。
- 4) ヘッド先端に、患者の外耳道/鼻腔径にあったスペキュラを取り付け、患者の外耳道又は鼻腔にスペキュラ先端部を挿入し、ヘッドの開口部より外耳道、鼓膜又は鼻腔の検査を行います。
- 5) 単三電池内蔵型はハンドルのスイッチを入れ耳鼻鏡を点灯させて使用してください。

【使用上の注意】

- ・本品に患者の体液・血液などが付着した場合は、速やかに洗浄又は拭き取りの上、感染予防のための処置を行ってください。
- ・ハロゲンランプを使用する場合は、使用中又は使用直後は、光源部周辺が高温になる場合があります。
- ・ヘッドの光学系やプラスチック部が劣化する可能性があるため紫外線殺菌灯などの設置された場所に放置しないでください。
- ・ディスプレイタイプスペキュラは、一人の患者のみに使用し、他の患者に使用しないでください。
- ・使用中に何らかの異常を感知した場合は、直ちに使用を中止して点検を行うかあるいはお取引のディーラー担当様または製造販売業者へ連絡してください。
- ・本製品は防水構造ではありません。水濡れなどが発生した場合は、直ちに使用を中止し乾燥した布などで十分拭き取ってください。内部に水などの侵入の恐れがある場合は、点検を受け安全が確認されるまで使用しないでください。電気ショックを受ける危険性があります。
- ・本製品の光源を見つめたり、連続して眼(眼球)を照明したりしないでください。眼の組織(網膜)に障害を引き起こす危険性があります。
- ・瞳孔径や嫌悪反応が通常ではない場合は、眼を保護してください。
- ・本製品は可燃性の麻酔ガス等の環境下では使用しないでください。爆発の恐れがあります。
- ・本品は滅菌などの措置はできません。故障の原因となります。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に保管してください。

****【保守・点検に係る事項】****洗浄・清掃方法**

- ・ハンドル及びヘッド本体は、消毒用エタノール又は、希釈した中性洗剤液を含ませた布で拭き、完全に乾燥させます。
- ・ヘッドの光学部は、市販の光学部品用クリーナー等を含ませた柔らかい布などで拭いた後、完全に乾燥させてください。清掃の際は、洗剤液などを過度に付けすぎないように、十分注意してください。
- ・リニューザブルスペキュラは、グルタルアルデヒド溶液を用い薬剤メーカー指定時間・温度に従い、また、70%イソプロピルアルコールへの浸漬にて消毒ができます。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**製造販売業者**

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

外国製造所(国名)

Welch Allyn Inc. (米国)

ウェルチ・アレン、インク