

機械器具 55 医療用洗浄器

一般医療機器 鼻用洗浄器 JMDN 41599000

販売名：NOPPY（ノッピー）nop-001

【警告】

〈使用方法〉

1. 本品を70℃以上のお湯に通したり、高温を加えないこと。(部品が変形し、機能しない恐れがある為)
2. 本品に無理な圧力をかける又は、水没させないこと。(バッテリーが破裂・発火する恐れがある為)
3. 本品は原則として同一患者使用の為、他の患者に使用しないこと。

【禁忌・禁止】

1. 目、耳、口腔には使用しないこと。
2. 鼻腔内に創傷がある場合及び塩化ナトリウム代謝障害者と、アレルギー体質がある場合は医師に相談の上、使用すること。
3. 洗浄後に鼻を軽くかむ必要があるため鼻が充分にかめない場合は使用しないこと。
4. 鼻の炎症（鼻づまり等）のひどい時は医師に相談の上使用すること。
5. 使用中や使用後に異常を感じた場合は使用を中止すること。
6. 複数回使用後に本体が変形したり、黄ばんだりして使用に支障をきたす場合は使用を中止すること。


◎小児が使用される際

7. 保護者の指導の下で使用すること。
8. 鼻を充分にかめない場合は使用しないこと。
9. 風邪や鼻づまりがひどい時は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】


1. 構成

「洗浄ヘッド」

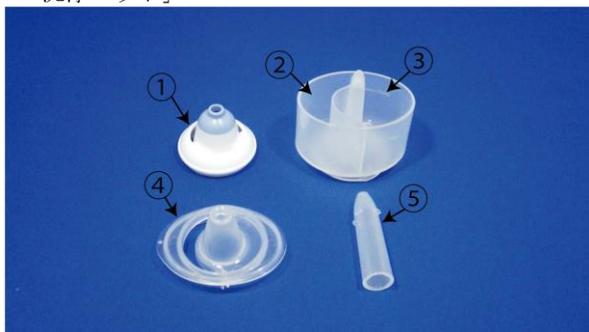


①ノズル ②廃水槽 ③貯水槽 ④蓋 ⑤汲水パイプ

「本体正面」

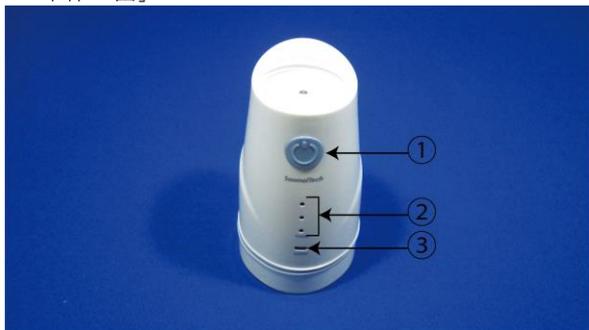

①スイッチ ②モードランプ ③電源ランプ

「本体裏面」

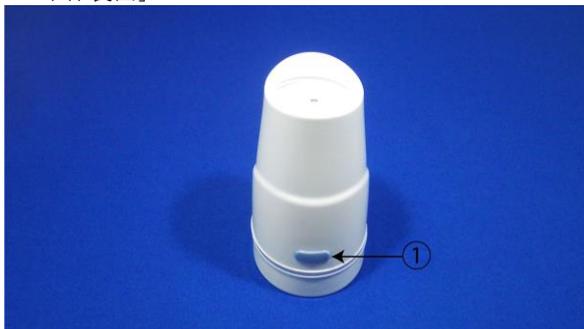

①Micro-USB 充電口

「付属品の USB 充電ケーブル」



2. 寸法及び重量

- ①寸法：55mm (W) × 65mm (D) × 160mm (H)
- ②重量：188g (洗浄液含まず)

3. 電氣的定格

- ①電源：DC3.7V (リチウムイオン電池)
- ②消費電力：3.5W 以下
- ③電撃に対する保護の形式：内部電源機器
- ④電撃に対する保護の程度：BF 型装着部

4. 水の有害な侵入に対する保護の等級

- ①本体 (洗浄ヘッド含まない)：IP22

5. 原理

内部電源により駆動されるポンプのパルス振動の作用により、ノズルから薬液が15~20μmの微粒子で噴霧される。

6. 使用環境条件

- ①周囲温度：5℃~40℃
- ②相対湿度：15%~80% (ただし、結露なきこと)
- ③気圧：700hPa~1060hPa (海拔2,000m以下)

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用目的又は効果】

本品は、薬剤を直接鼻腔に適用するために用いる器具である。

鼻の内腔から注入し、粘膜及び鼻の通路を洗浄及び治療する温かい塩水等の治療液を充填する器具である。

【使用方法等】

本品は再使用可能であるので、使用後は【保守・点検に係る事項】を参照し、洗浄すること。

1. 準備

- ①本製品は出荷時バッテリーに充電されていません。
付属のUSB充電ケーブルと本製品及び、別途市販の充電アダプターもしくはパソコン等に接続し、充電してから使用すること。
充電中は本製品の使用はできません。
- ②取扱説明書に従い洗浄ヘッドを組み立てる。
- ③本体に洗浄ヘッドを取り付ける。
- ④最大目盛を超えないようにぬるま湯程度に温めた別売NOPPY専用鼻洗浄液若しくは生理食塩水を貯水槽に注ぐ。

2. 使用方法

通常の場合、片側鼻孔の洗浄には別売NOPPY専用鼻洗浄液若しくは生理食塩水15mlの使用が目安となるが、使用者の健康状態或いは医師の指示に基づき、調整すること。

- ①噴射口を鼻孔に向ける。
- ②本体のスイッチを押し、モードを選び、洗浄を始める。
使用中は口で呼吸することを推奨する。
洗浄後、排水は自動的に排水槽に流れる。
- ③排水槽の廃液を捨て、再び別売NOPPY専用鼻洗浄液若しくは生理食塩水を注ぎ、もう一方の鼻孔を同様に洗浄する。

【使用上の注意】

1. 3歳以下の幼児が本製品を使用する場合、医師に相談の上使用すること。
2. 鼻粘膜に付着したものがひどい場合、医師に相談の上使用すること。
3. 鼻腔や咽頭に急性炎症がある場合には、鼻洗浄は避けること。
4. 洗浄液は付属していません。別売NOPPY専用鼻洗浄液若しくは生理食塩水を用意し、蒸留水や水道水は使用しないこと。
5. 原則として本人以外は使用しないこと。
本人以外が使用する場合は洗浄ヘッドを十分に洗浄し、消毒を行ってから使用すること。
6. 本品は防水性ではありません。洗浄の際に製品を水に水没させないこと。誤って水没させた場合は販売店にご相談ください。
7. 使用する水は生理食塩水を常温もしくは温めて使用すること。熱湯での使用はできません。
8. 機器の落下等は破損・故障の原因となるので、取扱には十分に注意すること。
9. 本品にはリチウムイオン電池が内蔵されているため本品を廃棄する場合は、自治体の規制に従って廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 長期間使用しない時

- ①本体は乾燥させてから、直射日光や高温多湿を避けて保管すること。
※水分がっているとカビや錆などの原因となる。
- ②使用を再開する時は一度水を通し、全体をよく水洗いしてから使用すること。

2. 保管条件

- ①周囲温度：-10℃～45℃
- ②相対湿度：95%以下（ただし、結露なきこと）
- ③気圧 500hPa～1060hPa（海拔 2,000m 以下）

3. 有効期間

- ①本品の一部でも変形、破損して品質、機能、性能が維持できない場合は、新しい製品と交換すること。
指定の保守、点検を実施した場合の耐用期間：3年[自己認証による]

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後のお手入れ

※本体を直接水に入れて洗浄することは出来ない。

- ①洗浄ヘッドを取り外し、各部品を純水で洗う。必要に応じて、アルコール、熱湯、次亜塩素酸ナトリウム（ミルボン等）で消毒する。
- ②清潔な布で各部品を拭き取る。
- ③本体及び本体と洗浄ヘッドの繋ぎ部分を拭き取る。
- ④洗浄ヘッドと本体を組立て、清潔な場所に保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社アスター電機

住所：神奈川県横浜市都筑区南山田 3-6-40

電話番号：045-590-5112

外国製造業者：Shanghai Sonmol Medical Equipment Co., Ltd

国名：中国

販売元：バイオメディカルネット株式会社

住所：東京都文京区湯島 2-18-6

湯島夏目ビル 6F

電話番号：03-5840-8172

【お問い合わせ先】

バイオメディカルネット株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 2-18-6 湯島夏目ビル 6F

TEL：03-5840-8172 FAX：03-5840-8173

受付時間 9：00～17：00（土、日 祝祭日を除く）

取扱説明書を必ずご参照ください。