

改訂日
2020年4月作成

医療機器届出番号 : 07B3X10010000003

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 経腸栄養注入セット 70400000

お湯さし君B型


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造】

1.形状・構造

本品は、ボトルとキャップからなり、ISO80369-3に適合する。

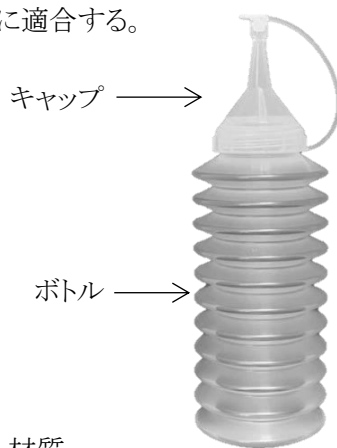

2.材質

ボトル : ポリプロピレン

キャップ : ポリプロピレン

【使用目的】

胃又は腸に挿入したカテーテルと連結して、濃厚流動食の前水投与等に使用する器具である。

本品は、ISO80369-3に適合するものである。

【使用方法】

1. キャップを開け、ボトルに前水を入れます。
2. 経管チューブに接続しボトルを逆さまにします。
3. ボトルから出る量に合わせてそっと力を加え続けます。
4. 投与が終わったら、逆流しないようチューブを折り曲げるかロックします。
5. 経管チューブからお湯さし君を外します。この時も逆流に注意してください。

【使用上の注意】

1. 経腸栄養ライン以外で使用しないこと。
2. お湯さし君B型は、繰り返しの使用を推奨していません。
3. 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ、及び詰まりには十分に注意すること。
4. コネクタ接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。(コネクタが外れなくなる、又はコネクタの破損、接続部からの液漏れの恐れがある)
5. 電子レンジは使用できません。

【保管方法及び有効期間】

1. 水濡れに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
2. 冷蔵保管際、衝撃が加わると本品が破損する可能性があります。
3. 折りたたんで保管しますと材質上、容器本体に癖がついてしまい、戻そうとしても元の大きさに戻らず、最大300mlを一度に投与できなくなってしまうので注意してください。
4. 有効期間:1年

【製造販売業者の氏名又は名称】

製造販売(お問い合わせ先)

診療化成 株式会社

電話番号 0247-46-3297

製造

診療化成 株式会社