

MAPシステム イン트로キット2

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 歯科材料を口腔内に注入するために用いる器具である。

〔材質〕

- ・NiTi メモリーシェーブニードル 2：ニッケルチタン合金
- ・プラスチックブランジャー：プラスチック製
- ・シリンジ・ウェル：ステンレス
- ・クリーニーフロス：ナイロン

〔形状・構造等〕

〔キット内容〕

- ・ステンレスシリンジ
- ・ステンレススチールウェル
- ・NiTi メモリーシェーブニードル 2、各サイズ 1 本
(イエロー #90、レッド #110、ブルー #130)
- ・プラスチックブランジャー各サイズ 16 本
(イエロー #90、レッド #110、ブルー #130)
- ・クリーニーフロス (30 本)
- ・ケース

外観写真



- ①NiTi メモリーシェーブニードル 2
②プラスチックブランジャー
③クリーニーフロス

〔原理〕

ニードル内に充填した材料を押し出す事で、口腔内に注入できる。

【使用目的又は効果】

歯科材料を口腔内に注入する。

【使用方法】

1. ニードルの先端に適合するブランジャーをはめ込む。
2. 先端部がでてくるまでシリンジのヘッドを押し、先端凹部にブランジャーを差し込む。
3. ニードルを回転し、シリンジに固定する。
4. ウェル内の充填材にニードル先端部を押し付け、ニードル内に充填材を入れる。
5. ヘッドを押し、充填剤を歯牙に注入する。
6. 充填終了後は速やかにシリンジからニードルとブランジャーを外す。
7. すぐにクリーニーフロスを使用して、シリンジ及びニードル内部を清掃する。
8. 清掃後、シリンジ、ニードルをオートクレーブ滅菌する。
(滅菌温度：134℃、18 分)
*プラスチックブランジャー及びクリーニーフロスは滅菌不可
*プラスチックブランジャーは使用前にアルコールガーゼ等で消毒洗浄してからご使用ください。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

1. 使用前は滅菌/消毒すること。
2. 使用後は充填材料が硬化する前に、速やかにニードル内部を清掃すること。
3. 本品を使用する際は、手袋、保護眼鏡等を着用すること。

【使用上の注意】

1. 損傷・変形等があるものは使用しないこと。
2. 使用後は直ちに清掃し、血液・組織等の付着が無いことを確認すること。
3. 消毒液を使用する際は、説明書に従うこと。
4. 強酸性水、強アルカリ水は使用しないこと。
5. 本品の材質を腐食させる恐れのある薬液（過酸化水素水、水酸化ナトリウム水溶液、次亜塩素酸等）は使用しないこと。
6. 本品は【使用目的又は効果】に記載する用途以外に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

本品は、高温多湿、直射日光を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック
〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号
TEL：03-5827-1380 FAX：03-5827-1381
製造業者：Produits Dentaires SA(Switzerland)