

機械器具 16 体温計  
管理医療機器 皮膚赤外線体温計 17888000

非接触式体温計 NC200

【警告】

- ・ 本体を落下したり、ぶついたりして外部から強い衝撃を与えないでください。特にセンサーのある頭部に衝撃を与えないでください。[全体の機能が停止する原因になる]
- ・ 使用後は保管用ケースに必ずしまってください。[センサーが汚れ、機能の異常や破損の原因になる]

【禁忌・禁止】


- ・ 測定結果が 37.2℃を超えた場合、測定完了後に短いアラームが 10 回鳴り、バックライトが赤くなるよう設計されています。しかしながら、人によって発熱と判断される温度は異なる為、アラーム音だけで発熱の有無を判断しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本品は、本体、保管用ケース、単 4 形アルカリ乾電池 2 本から構成されています。

2. 外観図

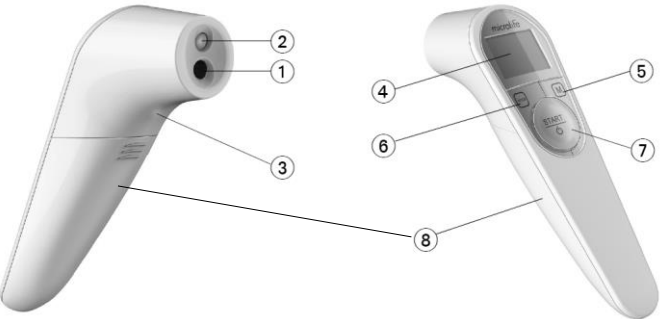

3. 各部の名称及び機能

No.	各部の名称	機能
①	センサー	放射赤外線を放射/感知する部位。
②	LED ライト	色のついた LED を発光する部位。
③	自己測定補助ライト	緑色に光り測定が完了したことを知らせる。
④	ディスプレイ	温度や動作中の状態を表示する。
⑤	メモリーボタン	過去の測定値を呼び出す。30 回分の測定値を確認することが出来る。
⑥	モードボタン	体温測定モード/表面温度測定モードを切り替える。
⑦	スタート/電源ボタン	電源の on/off を切り替える。測定を開始する。
⑧	本体ケース及び電池カバー	製品の外装及び電池の装着部位の蓋。

4. 原理

本品は、体表面の温度を非接触的に測定し、測定した温度を表示する皮膚赤外線体温計です。  
体温測定モードでは、額を測定部位として測定した額温から体温（腋窩温）を導き出して表示します。また、物体温度測定モードでは、物体の表面部位を測定し実測温度を表示します。

5. 仕様

項目	仕様
測定部位	体温測定モード：額部 物体温度測定モード：物体表面
体温測定範囲	34.0～43.0℃
表面温度測定範囲	0.1～99.9℃
精度	体温測定モード：±0.2℃（35.0～42.0℃） ±0.3℃（上記以外） 物体温度測定モード：±1.0℃（0.1～99.9℃）
最小表示単位	0.1℃
使用环境温度	体温測定モード：15.0～40.0℃ 物体温度測定モード：5.0～40.0℃
定格電圧	DC 3V（単 4 形アルカリ乾電池 2 本）
電池の使用期間	約 2,000 回の測定に使用できます。
測定時間	約 1 秒
オートパワーオフ	約 1 分
メモリー機能	最大 30 回分の測定値を保存
本体寸法	約 43.0×156.7×47.0（mm）
本体重量	約 68.5g（電池含まず）

6. 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器  
電撃に対する保護の程度による装着部の分類：BF 形装着部  
水の侵入に対する保護の程度による分類：IP22

7. 電磁両立性規格（EMC）

本品は IEC60601-1-2：2014 に適合しています。

【使用目的又は効果】

体表面上の皮膚の温度（額温）を測定するために用いること。



【使用方法等】

<使用方法>

1. 使用前の準備

- （1）電池カバーを外し、単 4 形アルカリ乾電池 2 本をセットしてください。
- （2）日付、時刻を設定してください。

2. 使用中の操作

- （1）体温測定モードで使用する場合
  - ・ 電源ボタンを押すとディスプレイ上に「」が表示され、体温測定モードになる。
  - ・ 使用中に物体温度測定モードに切り替える場合は、モードボタンを押して切り替える。
  - ・ センサーと額部の距離が 5cm 以下まで近づくと、自動で体温測定を開始する。
  - ・ 測定開始約 1 秒後にアラーム音がしたら、測定が終了し腋窩温に換算された体温が表示されます。
- （2）物体温度測定モードで使用する場合
  - ・ 電源ボタンを押したあと、モードボタンを押して「」を表示させます。
  - ・ センサーと物体表面の距離が 5cm 以下になるようにし、スター

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

- トボタンを押します。
- ・スタートボタンを押して約1秒後にアラーム音がしたら、測定が終了し温度が表示されます。

- (3) 測定が終了したら、電源ボタンを約3秒押して電源を切りま  
す。電源ボタンを押さなくても、約1分後に自動的に電源が  
切れます。

※使用方法等の詳細については、取扱説明書をよくお読みください。

## 【使用上の注意】

### ＜重要な基本的注意＞

- ・本体や付属品を幼児の手の届かない場所に置かないでください。  
[誤飲やけがの恐れがある]
- ・破損したものは使用しないでください。[けがの恐れがある]
- ・本体に激しい衝撃などを与えないでください。  
[故障の原因になる]
- ・LEDライトを長時間直視しないでください。[目の組織（網膜）に  
障害を引き起こす危険性があるため]
- ・電子レンジや携帯電話など、強い静電気や電磁波を発生するもの  
に近づけないでください。[誤作動や故障の原因になる]
- ・分解・修理・改造は行わないでください。[故障の原因になる]

### ＜使用方法などにおける注意事項＞

- ・体温を確認するための製品であり、医師の診断に代わるものでは  
ないことに注意してください。
- ・こどもだけで使わせないでください。[けがの恐れがある]
- ・体温測定モードでは、額部以外の体の部位に対して使用しないで  
ください。[額部が測定部位であるため]
- ・本体を異なる周囲温度の場所に移動した場合には、30分以上時間  
をおいて周囲の温度になじませてください。[測定値の異常の原因  
になる]
- ・飲食後、運動後、入浴後、外出から帰宅後はすぐに測定せずに30  
分ほど待ってから測定してください。[測定値が高く出ることが  
ある]
- ・本品は室内で使用し、風や冷暖房機器などの熱の影響を受けない  
環境で測定してください。
- ・ほこり、ちりの多い場所や浴室など湿気の多い場所で使用しない  
でください。

## 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
  - ・高温や直射日光のあたる場所、水のかかる場所、湿度の高い場  
所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所に保管しな  
いください。
  - ・長期間使用しない場合は、電池を外して保管してください。
2. 有効期間（耐用年数）  
5年または10,000回のいずれか[自己認証（当社データ）による]

## 【取扱い上の注意】

- ・使用方法、周囲の温度などにより、測定精度に影響を及ぼす場合  
があります。
- ・取扱説明書に記載した以外の使用方法及び製造販売業者以外が  
修理や改造、再調整などを行わないでください。これらに起因す  
る損害などについて、弊社は責任を負いません。

## 【保守・点検に係る事項】

### ＜クリーニング方法＞

- ・70%イソプロピルアルコールで湿らせた綿ティッシュ又はアル  
コール消毒綿を使用し、本体・保管用ケース・センサーを拭いて  
ください。
- ・クリーニング時には、本体内部に液体が入らないよう注意して  
ください。また、水などの液体には浸さないでください。
- ・クリーニングには、研磨剤・シンナー・ベンジンなどは使用しな  
いください。

- ・センサー表面とディスプレイを傷つけないよう注意してくださ  
い。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：平日9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者 Onbo Electronic (Shenzhen) Co., Ltd

オンボエレクトロニクス社

製造国名 中国

2019-09-1-00044000

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。