

機械器具32医療用吸引器
管理医療機器 一般名称:電動式可搬型吸引器 (JMDNコード:36616030)

電動鼻水吸引器(カシュウ) TS-200

【警告】


- ・乳児の手の届かないところに保管してください。
[吸引ノズルを誤飲する恐れがあります。]
- ・初めての使用、または長期間保管後にご使用になる場合は、吸引器洗浄可能部品を洗浄してからご使用してください。雑菌の繁殖による感染の恐れがあります。
- ・必ず医師または医療従事者の指導のもと、使用してください。
- ・使用中に出血や、お子様が痛がる場合には直ちに使用をやめてください。[鼻孔内の粘膜を痛めたり鼻腔炎をおこす恐れがあります。]
- ・複数の方が使用する場合はその都度吸引ノズルを新しいものと交換するか、洗浄、消毒、または除菌してから使用してください。感染の危険があります。
- ・ご使用後は必ず取扱説明書に従って洗浄し、乾燥させた上で、清潔な場所に保管してください。
- ・本体から煙が出たり、異臭、異音がある場合は、すぐに使用を中止してください。
- ・分解、修理、改造などを行わないでください。

【禁忌・禁止】

- ＊本書に記載されている使用目的以外で使用しないでください。
[併用医療機器]
- ・MRI検査を行う際は本品を検査室に持ち込まないこと。
[MR装置への吸着や、火傷等の恐れがあるため]
- ・高気圧酸素治療装置に本品を持ち込まないこと。
[誤作動や爆発の恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・寸法

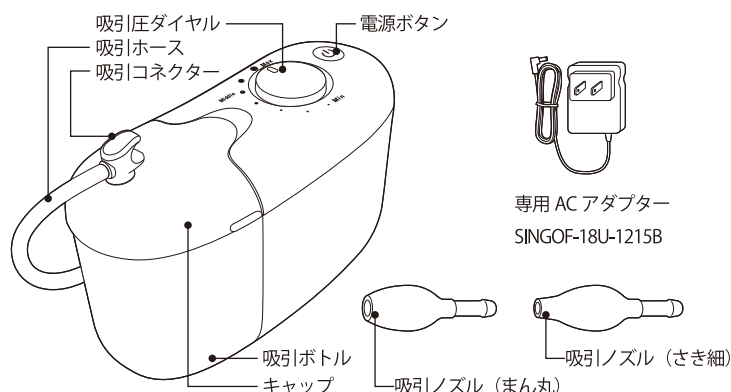

2. 電氣的定格

定格電圧:100V～50Hz/60Hz 25VA
(専用ACアダプター SINGOF-18U-1215B)
電撃に対する保護の形式による分類:クラスⅡ機器
電撃に対する保護の程度による分類:B形装着部
EMC:JIS T 0601-1-2:2012に適合

3. 作動原理

電動モーターで動作するポンプにより、吸引口から排出口への流体の流れを作り出す。この流れにより患者鼻孔にあてた吸引ノズルより鼻水を吸引する。

【使用目的又は効果】

家庭および院内において鼻腔内の鼻水の吸引に使用する。

【使用方法等】

1. 使用準備
 - 1) 吸引圧ダイヤルが最小であることを確認する。
- ★2) 専用ACアダプターまたはバッテリーケースのプラグを本体のDCジャックに接続し、ACアダプターの電源プラグはコンセントに差し込む。
- 3) 吸引ホースの片端を本体のホース吸引コネクタに接続する。
- 4) 吸引ノズルを吸引ホースに接続する。
2. 吸引
 - ★1) 本体の電源ボタンを押し、電源をオンにする。(吸引ポンプが作動)
 - 2) 清潔な水に吸引ノズルを入れ、20cc程度の水を吸引し、吸引ホース、吸引ノズルを濡らす。
 - 3) 吸引ノズルを患者の鼻孔に装着し、吸引圧力を低圧から調整しながら鼻水を吸引する。
3. 清掃・消毒
 - 1) 本体の電源ボタン押し、吸引ポンプを停止する。専用ACアダプターまたはバッテリーケースのプラグを本体から抜く。
 - 2) 吸引コネクタをキャップから外し、吸引ボトルを本体から外す。
 - 3) 吸引ボトルのキャップを回してはずす。
 - 4) 吸引ボトル内の吸引物を捨てる。
 - 5) 吸引ノズル、吸引ホース、吸引ボトル、キャップを水洗いし、消毒および乾燥を行い、収容する。

【使用上の注意】

＜重要な基本注意＞

- 1) 本書に記載されている以外の方法で使用しないこと。
- 2) 本器を使用中、本器より発煙・異音・異臭が発生した場合は直ちに使用を中止し、販売業者、製造販売業者に点検を依頼してください。
- ＊3) 吸引ボトルのパッキンは必ず取り付けて使用すること。
- ＊4) キャップは指定の位置まで回し、確実に閉めること。

【保管方法及び有効期間等】

- ＊使用環境条件:周囲温度: +5℃～+35℃
相対湿度:30%RH～75%RH(ただし結露なきこと)
- 保管環境条件:周囲温度:-10℃～+60℃
相対湿度:10%RH～75%RH(ただし結露なきこと)
- 耐用期間:3年(自己認証、製造元データによる)
- 大気圧:800～1060hPa

【保守・点検に係る事項】

- 1) 「取扱説明書」をよく読み理解したうえで、正しく安全に洗浄・消毒してください。
- 2) 長期間の保管後はご使用前に動作確認をしてください。また本製品に洗浄剤が残っていないことを確認してから使用してください。
- ＊3) 長期間の使用により、機器の部品などは摩耗、消耗し経年劣化します。部品にキズ、腐食、汚れがないことを定期的に確認してください。
- 4) 故障した場合は、修理や分解をせず、販売店または販売元に連絡してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者
株式会社 八森電子デバイス
〒018-2643 秋田県山本郡八峰町八森字家の上166番地
TEL:0185-77-3383 FAX:0185-77-3788
- 製造業者
株式会社TRアンドK
- 販売業者
アズワン株式会社
〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号
TEL:0120-711-875

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。