

2025年9月 改訂(第5版)

一般医療機器 医 03 手術用手袋及び指サック
非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000**セーフタッチ ネオ ニトリルグローブ**

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止**【包装】**

200枚入/箱

【形状・構造及び原理等】

- 非天然ゴム製パウダーフリー
アレルギーの原因の一つであるプロテインを含まない手に優しいニトリルゴム製グローブ
- 使い捨てタイプ
- 左右兼用、未滅菌

【製造販売業者及び外国製造所国名】

- 製造販売業者
A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通一丁目2番10号読売神戸ビル9階
TEL 078-327-2333

【使用目的又は効果】

手術を除いた、検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成ゴム手袋。

●外国製造所国名

マレーシア

【使用方法等】

箱を開封して、グローブを取り出し装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - 複数の患者には使用しないでください。
 - 合成ニトリルゴムは、体質により痒み、かぶれ、発疹などの症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には使用中を中止し、適切な処置を施してください。
 - 包装が破損していたり、汚損していたり、異物などの異常が認められた場合には、使用しないでください。
 - 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。
 - 本品を廃棄する場合は、感染防止に留意し安全な方法で処分してください。
2. 相互作用
 - 薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上、使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所を避けて常温で保管してください。
 - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。
2. 有効期間
 - 上記保管条件のもとで、
ホワイト：製造後3年（製造元データによる）
ブルー：製造後5年（製造元データによる）
使用の期限は包装箱に記載する。