

機械器具 27 医療用マイクローム
一般医療機器 再使用可能なマイクローム用刃 42439000


フェザーマイクロームホルダー

【警告】

- 専用替刃は非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。[切傷、穿刺等のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

主な形状

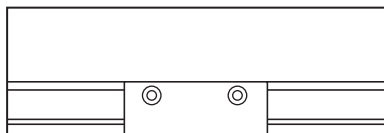

組成：工具鋼/ステンレス鋼

原理：本品は、非常に鋭利な切刃（単回使用マイクローム用刃）を取り付けることにより、通常、パラフィンで固定された組織を超薄片に削る。

【使用目的又は効果】

マイクローム替刃を取り付け、薄切機を用いることで、パラフィンに固定した組織を超薄片に削るために設計された器具。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

専用替刃を装着し、マイクローム機本体へ取り付けて使用してください。詳細は取扱説明書[替刃の装着及び交換方法]を参照してください。

<専用替刃> フェザーマイクローム替刃

製造販売届出番号：21B2X10001071002

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 専用替刃以外の替刃を取り付けないこと。[替刃が固定できないおそれがある。]

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 専用替刃がホルダーに固定できたことを確認し使用すること。
- マイクローム機本体の取扱説明書に従いホルダーを確実にマイクローム機本体に固定し使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 使用後は、替刃を取り外して保管すること。
- 水分を除去し防錆処置を行い、専用ケースに入れ保管すること。
- 耐用年数：使用後1年(未使用品保証期間5年)(自己認証による)
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

00-A — 製造月(例、A…1月 B…2月)

製造年西暦下2桁

【保守・点検に係る事項】

- 詳細は取扱説明書[お手入れの方法]を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売元>フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

<製造元>フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

<お問い合わせ先>フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917

取扱説明書を必ずご参照ください