

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 開孔器 35517000

MMI バイトブロック

再使用禁止

【禁忌・禁止】
<使用方法>
再使用禁止

**【使用上の注意】

重要な基本的注意

本品は MR Safe であり、一般的な MR 検査による影響はない〔自己認証による〕。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】


製造販売業者：**村中医療器 株式会社**
TEL：0725-53-5546



製造業者：パシフィック ホスピタル サプライ社
Pacific Hospital Supply Co., Ltd. 台湾

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

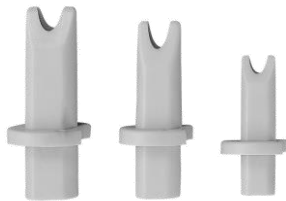

2. 原材料

ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジイソノニル）

3. 原理

筒の形状をしたブロック体で硬度に富んでおり、上下顎切歯間に挿入することで開口を維持する。口腔に気管チューブ等を留置しても、保護される。

【使用目的又は効果】

様々なサイズ、形状及び輪郭のものがある。挿入して開孔するときには開口部を拡張することができる。検査又は他の器具の挿入時に用いる。

*【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 使用前に必ず洗浄・消毒し、必要に応じて滅菌する。
- 2) 患者の上下臼歯部を大きく開く。
- 3) 尖った方を上下顎切歯間に入れる。
- 4) 先端の溝が体の縦軸方向になるように留意しながら、中央部の出っ張り部分が歯の外側になるように留置する。
- 5) 本品がはずれたり、ずれたりしないようにテーピング等で、しっかりと固定する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 本品装着後は、意図した位置から脱落していないか、本品に損傷が起こっていないかの確認を常に怠らないこと。配置した位置等に異常がある場合は使用を中止すること〔患者の呼吸を阻害する可能性がある〕。
- 2) 適切なサイズを選択すること。
- 3) 患者の歯及び下顎の状態等に注意すること〔本品をかむことにより、不具合を生じる可能性がある〕。
- 4) 塩素系及びヨウ素系消毒剤等の薬剤の使用は避けること。
- 5) EOG 滅菌又は過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌が可能〔本品の耐熱温度：70℃〕。
- 6) 本品の交換手順や交換時期等について、院内基準の制定を推奨する。