

機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具
一般医療機器 手動式皮膚痛覚計 12950001

MM I ルーレット知覚計

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

鋭利な針を外周に配した歯車と柄から構成される。



2. 原材料：黄銅（クロムめっき）

3. 原理

歯車を回転させることで皮膚に連続的な刺激を与える。

【使用目的又は効果】

麻酔薬投与後の患者の痛みに関する感受性（ピンによる刺傷等）を測定するために用いる手動式装置をいう。痛覚計（algesimeter）ともいう。

【使用方法等】

- 1) 使用前に、必要に応じて洗浄・消毒する。
- 2) 先端を疑わしい部位の皮膚に当て、柄を手で操作して転がし、異常の有無あるいはその強弱を量る。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒する。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守る。中性洗剤を推奨する。
- 3) 超音波洗浄装置・ウォッシャー・ディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。
- 4) 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損傷するので使用を避ける。
- 5) 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
- 6) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。
- 7) 使用前に汚れ・破損・可動部の動き等を点検する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社
TEL 0725-53-5546
<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：チンコウメディカル社 台湾
CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.