

機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具  
一般医療機器 角度計 37529000

## MMⅠ 角度計

### 【形状、構造及び原理等】

#### 1. 形状

東大式、メルトゲン氏、三関節、神中式の 4 種の型式から構成される。



東大式



メルトゲン氏



三関節



神中式

#### 2. 原材料

ステンレス鋼

#### 3. 原理

角度測定に必要な人体部位の一边に基本アームを固定させ、可動アームを操作してもう一边に当てて角度を測定する。

### 【使用目的又は効果】

X 線又は手術時等に骨の角度を測定するために用いる器具をいう。通常、分度器として知られている。

### 【使用方法等】

#### 1. 使用方法

- 1) 使用前に、必要に応じて洗浄・消毒する。
- 2) 人体各部を測定する際、角度計に固定されている基本アームと可動アームにより角度を測定する（可動アームの初期位置を 0 度とする）。

#### 2. その他の注意

可動部に人体を挟まないよう注意すること。

### 【保守・点検に係る事項】

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒する。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守る。中性洗剤を推奨する。
- 3) 超音波洗浄装置・ウォッシャー・ディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ち易い状態でバスケット等に収納して処理する。
- 4) 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損傷するので使用を避ける。
- 5) 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
- 6) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。

7) 使用前に汚れ・破損・可動部の動き等を点検する。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：チンコウメディカル社 台湾

CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.