

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

ポジショニングエイド (i)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

〈併用医療機器〉

当社指定の構成品以外の組合せで使用しないこと〔相互作用の項参照〕。


〈使用方法〉

トータルニースタビライザー用パッドは再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的写真

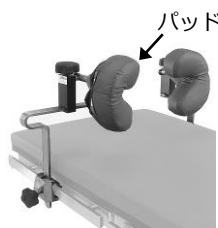

ショルダーサポート
適用患者体重 : 220 kg 以下



側臥位用支持器セット
適用患者体重 : 180 kg 以下




トータルニースタビライザー
適用患者体重 : 220 kg 以下




カーボンライトテーブル
適用患者体重 : 180 kg 以下



シンプルニークラッチ
適用患者体重 : 180 kg 以下
高さ調節範囲 : 405~530 mm

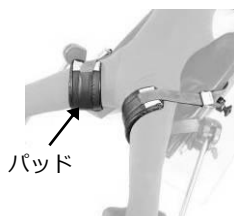


ニッセンストラップ
適用患者体重 : 220 kg 以下
ストラップ調節範囲 : 1220 mm 以下

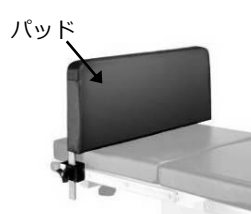

自在フットボード
適用患者体重 : 220 kg 以下
設置できる手術台幅
(レールを含む) : 530~590 mm



マルチタスクアームボード
適用患者体重 : 220 kg 以下
アームボード長 : 430~610 mm

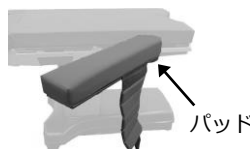

イージーアームボード
適用患者体重 : 180kg 以下
アームボード長 : 約 560 mm
(マウント部分を含まない)
トップ回転可動角度 : 180°



アームシールド
適用患者体重 : 220kg 以下

2. 原材料

ショルダーサポート用パッド : ポリウレタン
ブレスヘッド : ポリウレタン
トータルニースタビライザー用パッド : ポリエチレンフォーム
カーボンライトテーブル : カーボンファイバー
シンプルニークラッチ用パッド : ポリウレタン
ニッセンストラップ用パッド : ポリウレタン
自在フットボード用パッド : ポリウレタン
マルチタスクアームボード用パッド : ポリウレタン
アームシールド用パッド : ポリウレタン

3. 原理

手術等の際に、本品を手術台に固定し使用することで、患者の体位を固定・保持することができる。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。

【使用方法等】

1. 使用方法

各構成品は使用前に、必要に応じて消毒剤で清拭する。

〈ショルダーサポート〉

- 1) 本品をクランプに差し込み、患者の肩から頭側へ少し離して設置する。
- 2) 本品のショルダーサポート用パッドを、患者の腕神経叢を避け、肩甲骨の肩先突起部を覆う位置に調節する。
- 3) 患者をトレンデレンブルグ体位で固定する。

〈側臥位用支持器セット〉

- 1) 本品をクランプに差し込み、適切な高さに調節する。
- 2) 患者の体位に合わせ、本品を固定する。

〈トータルニースタビライザー〉

本品をクランプに差し込み、適切な高さに調節して固定する。

〈カーボンライトテーブル〉

- 1) 本品をクランプに差し込み、ロックして固定する。
- 2) 必要に応じて、オプションレグを使用する。

〈シンプルニークラッチ〉

- 1) クランプを患者の股関節の位置に合わせて手術台に取り付け、本品を差し込み固定する。
- 2) パッドに患者の両足を載せ、患者の体位に合わせて高さ、角度を調節する。
- 3) 患者の下肢をストラップで固定する。

〈ニッセンストラップ〉

- 1) バックルの付いていない側の固定クランプを手術台に取り付ける。
- 2) 患者の大腿部の下にストラップを通し、パッドが大腿部をつつむような位置にくるよう調節する。
- 3) ストラップをバックルで固定する。
- 4) もう一方のストラップも同様の手順で固定する。

〈自在フットボード〉

使用に応じて、本品を手術台に水平又は垂直にしてクランプに差し込み、固定する。

〈マルチタスクアームボード〉

- 1) 本品をソケットクランプに差し込み、適切な高さに調節して固定する。
- 2) アームボードエクステンションスリーブを引き、長さを調節する。
- 3) アームボードを適切な角度に調節し、ボードクランプハンドルを締めて固定する。
- 4) 必要に応じて、クラムシェルパッドを使用する。

〈イーザーアームボード〉

- 1) 本品をサイドレールに取り付け、パッドを載せる。
- 2) 角度を、トリガーロックを引く又は端を軽く持ち上げて調整する。
- 3) 患者の腕を本品の上に置きストラップを巻いて固定する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 本品を固定する手術台のサイドレール又は手術台アクセサリーのレール幅及び厚みに適正な手術台用クランプを選択すること。
- 2) 患者の身体に負荷をかけるような動作をしないこと。
- 3) ショルダーサポートを使用する際は、必ずショルダーサポート用パッドを取り付けること。
- 4) シンプルニークラッチによる固定は、患者に麻酔をかける前に行い、正常な可動範囲を確認すること。
- 5) シンプルニークラッチの位置決めの際、足首、膝と対角の肩関節を結ぶラインがまっすぐになるようにすること。
- 6) ニッセンストラップを使用する際は、ストラップを過度に引っ張らないようにすること。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 適用患者体重を遵守すること〔機器の破損や患者の脱落を起こすおそれがあるため〕。
- 2) 大腿部を胸の方向に 90°より大きく曲げないこと〔患者の神経を損傷するおそれがあるため〕（シンプルニークラッチ）。
- 3) 足首、膝と対角の肩関節を結ぶラインを股関節の外側に位置させないこと〔患者の神経を損傷するおそれがあるため〕（シンプルニークラッチ）。
- 4) ショルダーサポートは、肩甲骨の肩先突起部以外を覆う位置に設置しないこと〔腕の神経叢を圧迫すると重大な神経損傷を起こすおそれがあるため〕。
- 5) シンプルニークラッチは、長時間膝窩への圧迫が予想される手技には使用しないこと〔長時間膝窩を圧迫すると重大な神経障害を起こすおそれがあるため〕。
- 6) 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力が加わらないように装着すること。
- 7) 手術台用クランプのサイドレール又は手術台アクセサリーレールへの固定、各構成品の取付は確実にを行うこと。

2. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社指定の構成部品以外の他社製品	機器に重要な損傷を与え、患者又は使用者に重篤な障害をもたらす危険性がある。	本品との接続に関する安全性が確認されていない。

**【保管方法及び有効期間等】

耐用期間〔自己認証（当社データによる）〕

パッド(トータルニースタビライザー用パッドを除く)：3年
パッド以外：5年

*【保守・点検に係る事項】

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに清拭・消毒する。
- 2) パッド及びブレースヘッドはアルコール系消毒剤で清拭しないこと。
- 3) スプレータイプの洗浄剤、消毒剤を用いる場合は、直接吹きかけないこと〔錆の原因になるため〕。
- 4) 各構成部品は浸漬しないこと。
- 5) 各構成部品は滅菌しないこと。
- 6) 使用前に汚れ・破損・可動部の動き等を点検する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**村中医療器 株式会社**
TEL 0725-53-5546



製造業者：ヒルロム社 メキシコ
Hill-Rom De Mexico S de RL de CV