

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000

イリゲーションシリンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**村中医療器 株式会社**
TEL 0725-53-5546




製造業者：パシフィック ホスピタル サプライ社
Pacific Hospital Supply Co., Ltd. 台湾

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的写真

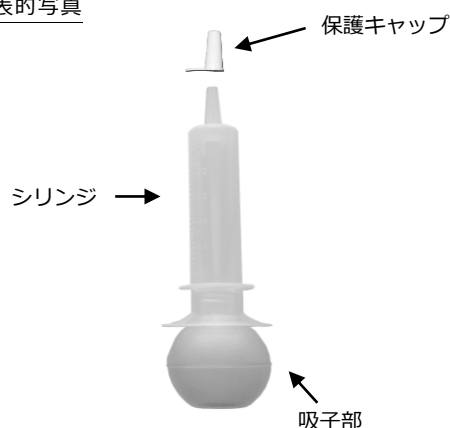

* 容量：60mL

2. 原材料

シリンジ：ポリプロピレン

保護キャップ：低密度ポリエチレン

吸子部：スチレン-エチレン・ブチレン-スチレンブロック共重合体

3. 原理

弾力性のある吸子部を手で握って圧迫すると、その容積が減じる。圧迫を緩めると減じた吸子部の復元力によって内部に陰圧が発生する。その際シリンジ先端が生理食塩水中にあればその陰圧によって生理食塩水が流入する。流入した生理食塩水は吸子部を手で再度圧迫することでシリンジ外に噴出される。

【使用目的又は効果】

身体の一部に適用する液体を噴出する装置をいう。衛生状態の維持又は治療の一環として用いる。手動式である。

*【使用方法等】

- 1) 使用前に必要なに応じて滅菌する。
- 2) 使用前に空気を模擬的に吸い込み吐き出させる。このとき吐出音を確認する。
- 3) 吸子部を手で握ったままでシリンジ先端を生理食塩水中に入れる。
- 4) 握った手を緩めて、生理食塩水を吸引する。
- 5) 患部に、吸子部を再度圧迫して生理食塩水を噴出する。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 滅菌を行う場合は、EOG 滅菌（60℃以下）を行い、じゅうぶんにエアレーションを行うこと。
- 2) 有機溶媒との接触は避けること。