

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 器具除染用洗浄器 35424000

ベリメドジェットウォッシャー


（ロボット支援手術器具 Xi 用ラック）

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本品は、ロボット支援手術器具 Xi の洗浄・除染/消毒・乾燥等を行う際に、本体の WD290ND 又は WD290IQ（以下 WD と表記）に搭載するラックである。基本セット及び拡張キット等で構成される。

代表的写真

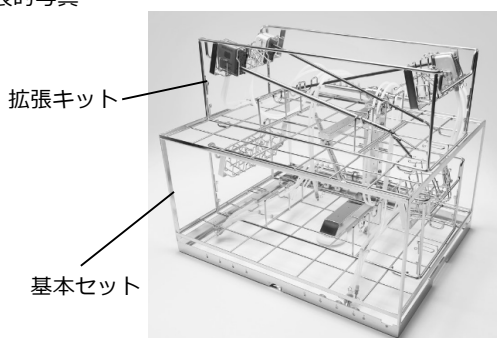

2. 原理

本品は、対象とする洗浄物に応じ、既定のプログラムに従って洗浄、すすぎ、除染/消毒、乾燥工程を自動で行うことができる。また、長時間使用されなかった場合に備え、チャンバー（洗浄物を処理する槽）および送水ラインを自動的に洗浄、除染/消毒する機能を備えている機種もある。

【使用目的又は効果】

再使用可能な手術器具、麻酔器具、及び他の手術用具の(化学的又は加熱)除染・消毒のために用いる洗浄器をいう。乾燥機能を内蔵したものもある。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 取扱説明書に従い、被洗浄物を本品にセットする。
- WD の電源を入れ、WD のドアを開ける。
- 本品を WD のチャンバー内に挿入して、ドアを閉める。
- WD のプログラムスイッチを押し、プログラムを選択して運転を開始させる。
- プログラムが終了すると運転が完了し、ブザーが鳴る。
- 洗浄物を取り出す。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 本品は、「da Vinci Xi サージカルシステム」用インストゥルメント(インテュイティブサージカル合同会社)を洗浄・消毒・乾燥するための専用ラックである。それ以外に使用しないこと。
- 熱消毒プログラムを途中で中断しないこと [消毒効果に影響する可能性があるため]。
- 工程終了後、洗浄物に触れる際は、耐熱グローブを着用すること [熱傷の危険があるため]。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- WD のプログラム及び洗剤は、インテュイティブサージカル合同会社の認証を受けたものを推奨する。
- 洗浄に関する詳細は「da Vinci Xi サージカルシステム」の洗浄滅菌方法説明書（インテュイティブサージカル合同会社）を参照すること。
- WD での処理前に洗浄滅菌方法説明書に従い、被洗浄物は必ず手による洗浄を十分に行うこと。
- 本品を移載する際は、手や指を挟まないよう注意すること。
- 本品を移動する際は、専用の搬送カートを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間

7 年 [自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

1. 清掃方法

- 使用後、フィルターハウジング内部のフィルターはナイロン製ブラシを使用して流水下で洗浄する。
- スプレーアームを取り外し、ゴミ等のつまりを取り除く。スプレーアームの取外し/取付けの際は、必ず下から手で支えながら行うこと。
- チューブアセンブリを分解し、マニホールド、チューブ、フィルターハウジング内の水をエアーガン等で飛ばし、乾燥させる。

2. 使用者による保守点検事項

- 始業、終業点検を必ず行い、正常かつ安全な作動を確認すること。

点検項目	点検内容
外観	・歪み、変形、破損等がないこと ・チューブに亀裂等がないこと
基本動作	・スプレーアームがスムーズに回転すること

- 消耗部品（チューブ、フィルター、Oリング等）の交換目安は 3 年である [自己認証（当社データ）による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 村中医療器 株式会社
TEL : 0725-53-5546製造業者: ベリメド ポミヴァルニ システム社 スロベニア
Belimed pomivalni sistemi d.o.o.

取扱説明書を必ずご参照ください