

機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器 瞳孔計 13236000

MMI 瞳孔計

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状



MMI 瞳孔計
(平板型)



MMI LED ペンライト瞳孔計付
(ペンライト型)

2. 原材料

MMI 瞳孔計：アルミニウム

3. 原理

瞳孔の大きさは、半円又は円との比較によって計測する。

【使用目的又は効果】

瞳孔の幅又は径を測定するために用いる眼科用器具をいう。

**【使用方法等】

1. 乾電池の挿入・交換（ペンライト型）

- 1) LED 電球を左に回して取り外す。
- 2) 単 4 形乾電池を LED 電球側が＋極になる向きで挿入する。
乾電池交換の際は、2 本同時に新しい乾電池に交換する。



- 3) LED 電球を右に回して取り付け。

2. 使用方法

- 1) 使用前に、必要に応じて洗浄・消毒する。
- 2) 本品を瞳孔に近づけて瞳孔の大きさを対比的に観察して測定する。平板型の場合、ものさしを利用して瞳孔の幅又は径、瞳孔間の距離を測定する。
- 3) カバーテスト用のカバーとして用いる場合がある（眼位検査用）。
- 4) ペンライト型の場合、ポケット収納クリップの先端部を押すとライトが点灯し、押す力を緩めると消灯する。

【保管方法及び有効期間等】

長期間使用しない場合は乾電池を抜いておく（ペンライト型）。

**【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒

汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに清拭・消毒する。

2. 点検

- 1) 使用前に汚れ・破損等を点検する。

- 2) 【使用方法等】にしたがって、正常な点灯を確認する（ペンライト型）。

- 3) LED 電球が暗くなってきた場合又は点灯しない場合は、予備の乾電池に交換する（ペンライト型）。

- 4) 予備の乾電池を常に備えておくことを推奨する（ペンライト型）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**村中医療器 株式会社**
TEL 0725-53-5546



製造業者：チンコウメディカル社 台湾
CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.