

機械器具 30 結紮器及び縫合器
管理医療機器 単回使用ステープルリムーバ 16787002

ボニメッド ステープルリムーバー

再使用禁止

*【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

再使用禁止、再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的写真

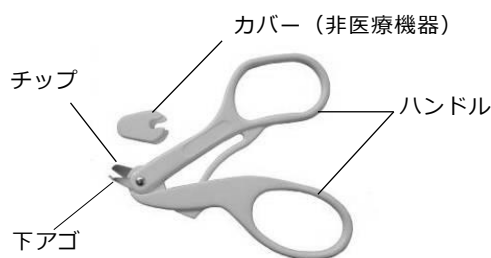

2. 原材料

チップ/下アゴ：ステンレス鋼

3. 原理

本品の下アゴを皮膚組織に打針されているステープルの下に滑り込ませ、チップと下アゴでステープルを挟んでハンドルを握ると、ステープルが変形して開く。そのまままっすぐ上方に持ち上げることで、ステープルが組織から抜去される。


【使用目的又は効果】

手術に使用したステープルを抜去するために用いる。

**【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 本品を、滅菌包装より無菌的に取り出す。
- 2) 本品のカバーをはずし、下アゴが下側になるように握る。
- 3) 本品の下アゴを抜去するステープルの下に滑り込ませ、両先端がステープルの下にあることを確認する。
- 4) 本品のハンドルを完全に閉じるまで強く握り締め、ステープルが完全に開いたことを確認する。
- 5) ハンドルを閉じた状態のまま、ステープルを組織からまっすぐ上方に持ち上げる。
- 6) 3)～5)の手順を繰り返す。

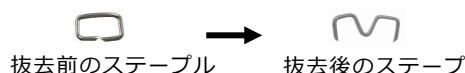

抜去前のステープル

抜去後のステープル

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) ステープルは、完全に開くまで持ち上げないこと〔ステープルの抜去が不完全となり、皮膚を損傷するおそれがある〕。
- 2) ステープルが完全に抜去されるまで、ハンドルは閉じておくこと〔ステープルが縫合部に残るおそれがある〕。

3. 組み合わせて使用する医療機器

本品は、「販売名：BONIMED スキンステープラー II、認証番号：230ADBZX00005000」と併用して使用できる。

*【保管方法及び有効期間等】

滅菌有効期間：3年〔自己認証（当社データ）による〕。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**村中医療器 株式会社**
TEL:0725-53-5546



製造業者：モダンメディカルイクイPMENT社
Modern Medical Equipment Mfg. Ltd.
中華人民共和国