

THUASNE オルテル ヘルニアバンド（脱腸帯）

【警告】

＜使用方法＞

1. 本品の使用に当たって、鼠径ヘルニアに対する正しい知識が必要です。自己判断をせず必ず専門の医師にご相談ください【症状の悪化につながる恐れがあります】。
2. 本品を装着した際に痛み・かゆみ・違和感・不快感等の症状が出た場合はご使用を中止し、医師にご相談ください【症状の悪化につながる恐れがあります】。

【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

天然ゴム（ラテックス）アレルギーのある方は肌に直接触れないでください。【症状を引き起こす恐れがあります】


＜使用方法＞

1. 本品は一患者使用の製品のため、他の人に使用しないでください【衛生上の問題が発生したり、性能上の効果が得られない可能性があります】。
2. 鼠径ヘルニアを完全に還納（お腹の中に戻すことを）できない場合には本品のご使用をお控えください【症状の悪化につながる恐れがあります】。

* 【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的写真

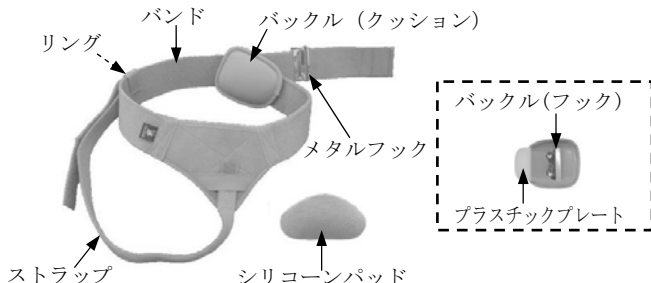

（写真は右側鼠径ヘルニアに使用する時のイメージです）

サイズ	ウエスト適用範囲
1(S)	75-85cm
2(M)	86-97cm
3(L)	98-110cm

2. 原材料

シリコンパッド（表面）：綿

バンド、ストラップ：綿，ゴム（ラテックス含有），ポリアミド

バックル（クッション表面）：綿

3. 原理

鼠径部の筋膜の間などから皮膚の下に突出したヘルニアを元の位置に戻し、本品のシリコンパッドによって皮膚の上から患部を圧迫することで、一時的に鼠径ヘルニアの症状を緩和させます。

【使用目的又は効果】

腹部の脱疾を正常な位置に保持するため骨盤及び腹部に巻くストラップです。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- 1) 右側に鼠径ヘルニアがある場合は「THUASNE」青色タグを外側に向けて、左側にある場合は青色タグを内側に向けて、ストラップを外側に取り付けます。
- 2) バックルのクッションを内側、フックを外側に向けてバンドの先（面ファスナー）に取り付けます。
- 3) メタルフックのフック部分が内側に向くよう取り付けます。
- 4) シリコンパッドをバンドの内側に取り付けます。
- 5) 装着位置（患部の位置）を定めてメタルフックをスライドさせ、バンドの長さを調節します。

2. 装着方法

- 1) 仰向けに寝転んだ姿勢で、ヘルニアを静かに揉み入れて、完全に還納（お腹の中に戻します）します。
- 2) 皮膚の上から患部にシリコンパッドをあてがい、蓋をするように押し当てます。
- 3) バンドをフックで留めて、骨盤の装着位置にしっかりと固定してください。必要場合は、メタルフックの位置を微調整します。
- 4) 立ち上がった状態で、ストラップを股間を通してバンドのリングに差し込み、面ファスナーで長さを調整して固定します。
- 5) シリコンパッドが適切な位置に取り付けられ、患部が適切な強さで圧迫されていることを確認してください。



（装着時のイメージ）

3. 使用方法に関連する使用上の注意
装着時は強く締め過ぎたり、ゆる過ぎないように注意してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 使用目的以外に使用しないでください。
- 2) 本品を改造したり修理をしないでください。

【保守・点検に係る事項】

洗浄・消毒

- 1) 40℃以下の石鹸水で手洗いし、自然乾燥してください。
- 2) 繊維の劣化を避けるため、高温、合成洗剤、漂白剤、洗濯機、乾燥機、アイロン、ドライクリーニング等のご使用はおやめください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社

TEL:0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：チュアンヌ社 フランス

Thuasne