

機械器具 40 医療用のこぎり
一般医療機器 手動式ギブスカッター 16341000

BONIMED ギブス剪刀

【形状・構造及び原理等】

1. 形状
代表的写真



2. 原材料
ステンレス鋼
3. 原理
ハンドルを握ると先端の2枚の刃が閉じ、対象物を切断する。

【使用目的又は効果】

はさみ様の手持型器具である。2枚の刃の遠位端から転心まで様々な顎状の構造をとり、ギブスを形成するための石膏又は合成材料を切断することができる。はさみ様の機構をなす片方の刃の先端は、患者の損傷を防ぐため鈍くなっている。

【使用方法等】

1. 使用方法
 - 1) 使用前に、必要に応じて洗浄・消毒する。
 - 2) ハンドルを握って先端を閉じ、対象物を切断する。
2. 使用方法等に関連する使用上の注意
刃の根本付近（ハンドル側）で切断すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意
本品で患者を傷つけないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒
 - 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒する。
 - 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱い方法を守る。中性洗剤を推奨する。
 - 3) 超音波洗浄装置・ウォッシャー・ディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。
 - 4) 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損傷させるため使用を避ける。
 - 5) 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
 - 6) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。
 - 7) 手術器具用潤滑剤の塗布を推奨する〔可動部の防錆のため〕。
2. 点検
使用前に汚れ・破損・変形・可動部の動き等を点検する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社
TEL 0725-53-5546
<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：エルメド社 パキスタン
Elmed Instruments (Pvt.) Ltd.