

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 手術補助用シート 61448001

上山式シリコンシート

再使用禁止

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

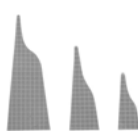
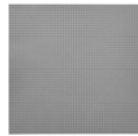
再使用禁止 [感染する可能性がある。また、外見上損傷していないように見えても、材質の劣化が生じている可能性がある]。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

手術の際に、術野における組織や手術器具等の下に挿入して用いる、造影剤を含有したシートである。1mm 四方の方眼目盛りを有する。

代表的写真

形状切り出し
タイプ

正方形タイプ

2. 原材料

シリコン、硫酸バリウム

3. 原理

手術の際に、対象とする組織又は手術器具等と周辺組織との間に本品を挿入することで、視認性を向上させる。目盛りにより、対象物の概略寸法を把握する。

【使用目的又は効果】

手術の際に、術野における組織や手術器具等の視認性の向上を目的として一時的に用いる、単回使用のシートである。目盛りを有する。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 使用前に洗浄及び滅菌を行う。また、必要に応じて適切な形状に切断する。

滅菌は、医療機関でバリデーションされた滅菌条件で行うこと。「医療現場における滅菌保証のガイドライン 2015」に記載されている高圧蒸気滅菌条件は下表のとおり。

滅菌温度	保持時間
121℃	15 分
126℃	10 分
134℃	3 分

- 2) 本品を対象組織の下に挿入する。
3) 使用後は適用部位から取り出し、医療廃棄物として廃棄する。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) 本品を鋭利な器具で掴まないこと。先細の器具等で掴む場合は傷がつかないように注意すること。
2) 強く折り曲げないこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 適切なサイズを選択すること。
- 切断して使用する場合は、切断片が術野に混入しないように取扱うこと。
- 使用後は必ず適用部位から本品を取り出すこと。また、閉創前に確実に取り出したことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光を避け、常温・常湿で清潔な場所で保管すること。

2. 有効期間

3 年 [自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器 株式会社
TEL:0725-53-5546