

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 短期的使用口腔咽頭エアウェイ 70259000

## MMI ゲデルエアウェイ

### 再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
**〈使用方法〉**  
再使用禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状

本品は、サイズの違いにより種類がある。

代表的写真



#### 2. 原材料

ポリエチレン、ポリプロピレン

#### 3. 原理

緩やかにカーブした中空構造により、沈下した舌根及び喉頭蓋を拳上することで、気道を確保する。

### 【使用目的又は効果】

短期的使用を目的として、ガス交換又は吸引時に気道の開存性を維持するために口腔のみに挿入する湾曲したプラスチック製のチューブである。本品は、舌による気流遮断の防止に有用である。

### 【使用方法等】

#### 1. 使用方法

- 1) 使用前に汚れ・破損等がないことを確認する。
- 2) 使用前に必要なに応じて洗浄又はアルコール清拭等を行う。
- 3) 本品先端を口蓋側に向け、口腔内に挿入する。
- 4) 湾曲部を舌に滑らせるように挿入し、適度な深さで180°回転させて先端を舌根部へ向けて挿入し、正しい位置に設置する。
- 5) 気道の開通状態を確認する。

#### 2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 患者に適合するサイズを選択すること。
- 2) 洗浄は75℃を超えないこと。
- 3) 滅菌はしないこと。
- 4) 汚れ・破損等がある場合は使用しないこと。
- 5) 挿入中の本品の位置や患者の生体反応を常に確認すること。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 1) 反射が残っている患者への使用は注意すること〔嘔吐反射、咽頭痙攣を誘発するおそれがあるため〕。

- 2) 挿入時に嘔気・嘔吐があった場合は、無理に挿入しないこと。
- 3) 舌を奥に押し込むような挿入はしないこと〔気道閉塞を起こす恐れがある〕。
- 4) 本品挿入後、開口部が閉塞されていないことを確認すること〔不適切な挿入により十分な気道確保ができない恐れがある〕。
- 5) 24時間以上使用する場合は、24時間ごとに洗浄・消毒を行う。汚れが落ちない場合は、新品と交換することを推奨する。

### 【保管方法及び有効期間等】

有効期間: 3年〔自己認証(当社データ)による〕。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 **村中医療器株式会社**  
TEL: 0725-53-5546



製造業者: ゲールメッド社 中華人民共和国  
GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.