

ディスポーザブル細胞診ブラシ BC-201C-1006

再使用禁止

*【禁忌・禁止】


再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

- 構成
本製品はツマミ、挿入部、ブラシ部の構造からなる。
- 各部の名称

★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。

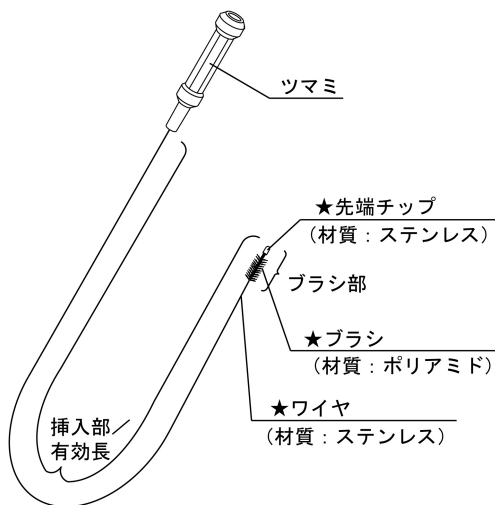

3.仕様

モデル名	BC-201C-1006		
有効長 (mm)	1050		
ブラシ部	外径 (mm)	Φ1	
	長さ (mm)	6	
組み合わせ可能な当社内視鏡	有効長	600mm 以下	
	チャンネル径	Φ1.2mm	

詳細は『取扱説明書』の「第 2 章 各部の名称、機能および仕様」を参照すること。

作動・動作原理

ブラシ部を体腔内組織に擦過させることにより、ブラシ部に細胞が採取される。

【使用目的又は効果】

使用目的

当社指定の内視鏡と組み合わせて、呼吸器内等の細胞を擦過して採取することを目的とする。

【使用方法等】

- 点検
滅菌パックの点検、本製品の外観の点検をする。
- 内視鏡への挿入
(1)内視鏡の鉗子栓に挿入する。
(2)内視鏡またはX線透視下で確認しながら、挿入部先端を目的部位まで挿入する。
- 採取
(1)ブラシで目的の組織を擦過し、細胞を採取する。

(2)ブラシを目的部位より引き出す。

4.内視鏡からの引き抜き

ブラシ先端を内視鏡の先端付近まで引き、本製品を内視鏡ごと体外へ引き抜くか、内視鏡から本製品を引き抜く。

5.廃棄

本製品の使用が終了したら、適切な方法で廃棄する。

使用方法に関する詳細については、『取扱説明書』の「第 4 章 用法」を参照すること。

組み合わせて使用する医療機器については、【形状・構造及び原理等】の「3.仕様」を参照すること。

*【使用上の注意】

重要な基本的注意

一般的事項

- (1)内視鏡の視野が確保されていない状態で、本製品を内視鏡に挿入しないこと。また、内視鏡の視野内あるいはX線透視下で挿入部先端が確認できていない状態で、本製品の連続的操作をしないこと。
- (2)急激な突き出しはしないこと。
- (3)抵抗が大きくて内視鏡への挿入が困難な場合は、無理なく挿入できるところまで内視鏡のアングルを戻すこと。
- (4)挿入部先端を内視鏡から突き出している状態で、急激な内視鏡のアングルを操作しないこと。
- (5)無理な力で挿入部先端を体腔内組織に押し付けけないこと。
- (6)本製品を内視鏡から勢いよく引き抜かないこと。

詳細は、『取扱説明書』の「第 3 章 保管」、「第 4 章 用法」を参照すること。

不具合

その他の不具合

機器の破損、機能の低下

有害事象

その他の有害事象

感染、組織・皮膚の炎症、穿孔、大出血、粘膜損傷

*【保管方法及び有効期間等】

保管方法

詳細は『取扱説明書』の「第 3 章 保管」を参照すること。

有効期間

滅菌パックに表示された使用期限を確認すること。
(自己認証(当社データ)による)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149 (内視鏡お客様相談センター)

取扱説明書を必ずご参照ください。