

ディスプレイアダプター鉗子栓 MAJ-1414

再使用禁止

*【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

1.構成


- ・ディスプレイアダプター鉗子栓 MAJ-1414

2.各部の名称

- ・ディスプレイアダプター鉗子栓 MAJ-1414



- ・吸引用針 (本製品には含まれていない)

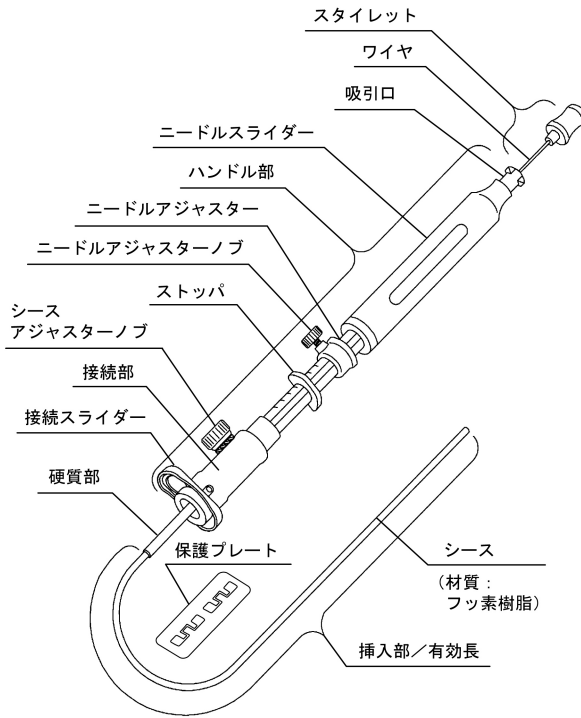

*3.仕様

モデル名	MAJ-1414
組み合わせ可能な有効長 (mm)	600mm 以下
当社超音波内視鏡 超音波走査方向	スコープ挿入方向に対して平行
組み合わせ可能な当社吸引用針	NA-201SX-4022

作動・動作原理

本製品は、超音波内視鏡の鉗子栓口金に取り付け、当社指定の吸引用針と組み合わせて使用することにより、気管、気管支および上部消化管の粘膜下や周辺臓器の組織や細胞を吸引採取することができる。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、気管、気管支、食道およびその周辺臓器の組織や細胞を吸引採取するために、当社指定の吸引用針と組み合わせて、当社指定の超音波内視鏡に取り付けて使用することを目的とする。

【使用方法等】

1.点検

滅菌パックの点検、本製品の外観の点検を行う。

2.内視鏡への取り付け

内視鏡の鉗子栓口金に本製品を取り付ける。

3.吸引用針の内視鏡への挿入

(1)吸引用針を挿入口にゆっくりと挿入する。

(2)吸引用針の操作部 (またはハンドル部) が突き当たるまで挿入し、針固定部に吸引用針の接続スライダーをスライドさせて、吸引用針の操作部を接続し、固定する。

**4.穿刺、吸引採取

吸引用針の『電子化された添付文書』および『取扱説明書』に記載されている操作方法に従って、目的の組織または細胞を吸引採取する。

5.吸引用針の内視鏡からの引き抜き

(1)吸引用針の接続スライダーをスライドさせて、吸引用針の操作部との接続を解除する。
(2)吸引用針をゆっくりと内視鏡から引き抜く。

6.内視鏡からの取りはずし

プルタブを引いて内視鏡の鉗子栓口金から本製品を取りはずす。

7.廃棄

本製品は、使用后、適切な方法で廃棄する。

本製品には、吸引用針は含まれていない。

組み合わせて使用する医療機器については、【形状・構造及び原理等】の「3.仕様」を参照すること。

*【使用上の注意】

重要な基本的注意

一般的事項

【形状・構造及び原理等】の「3.仕様」に記載されている吸引用針と組み合わせて使用する時には必ず本製品を内視鏡の鉗子栓取付口金へ装着し、内視鏡検査中は取りはずさないこと。

不具合

その他の不具合

機器の破損、機能の低下

有害事象

その他の有害事象

術者・患者の外傷

*【保管方法及び有効期間等】

有効期間

滅菌パックに表示された使用期限を確認すること。
(自己認証 (当社データ) による)

組み合わせて使用する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

組み合わせて使用する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。