

機械器具 25 医療用鏡 一般医療機器 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ JMDN コード 38834000

ディスポーザブル細胞診ブラシ BC-205D

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


構造・構成ユニット

1.構成

本製品は操作部、挿入部、ブラシ部で構成されている。

2.各部の名称

★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。

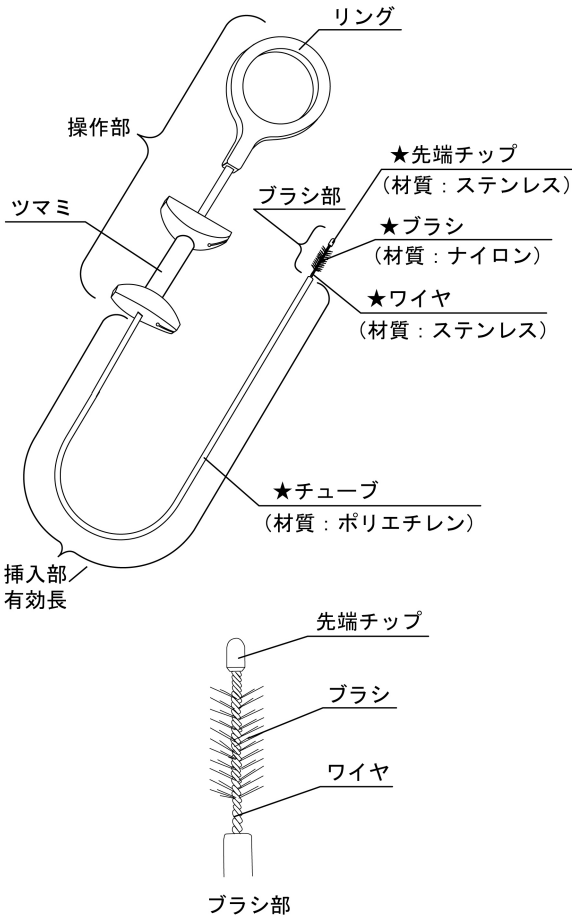

**3.仕様

モデル名	BC-205D-2010		
先端部の形状			
最大外径 (mm)	Φ1.4		
有効長 (mm)	1150		
ブラシ部	外径 (mm)	Φ2	
	長さ (mm)	10	

詳細は『取扱説明書』の「7 仕様」を参照すること。

作動・動作原理

操作部のリングを手前に引くとブラシがチューブ内に引き込まれ、押すとブラシが突き出る。ブラシを突き出した状態で目的部位を擦過することにより細胞の採取ができる。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、当社指定の内視鏡と組み合わせて呼吸器内の細胞を擦過採取することを目的とする。

【使用方法等】

1.点検

滅菌パックの点検、本製品の外観の点検、作動の点検をする。

2.内視鏡への挿入

- (1)リングを引いてブラシをチューブ内に引き込んだ状態で、内視鏡の鉗子栓に挿入する。
- (2)内視鏡または X 線透視下で確認しながら、挿入部先端を目的部位まで挿入する。

3.採取

- (1)リングを押し、ブラシをチューブから突き出し、目的部位を擦過する。
- (2)リングを引いてブラシをチューブ内に引き込む。

4.内視鏡からの引き抜き

内視鏡から本製品を引き抜く。

5.廃棄

本製品の使用が終了したら、適切な方法で廃棄する。

詳細は『取扱説明書』の「9 使用法」、「10 廃棄」を参照すること。

**組み合わせて使用する医療機器

本製品と組み合わせて使用可能な医療機器は以下である。

当社	有効長	600mm 以下
内視鏡	チャンネル径	Φ1.7mm 以上

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

一般的事項

- (1)内視鏡の視野が確保されていない状態で、本製品を内視鏡に挿入しないこと。また、内視鏡の視野内または X 線透視下で挿入部先端が確認できていない状態で、本製品の一連の動作をしないこと。
- (2)無理な挿入、ブラシがチューブ内に完全に引き込まれていない状態での挿入、および急激な挿入はしないこと。
- (3)挿入部先端を内視鏡から突き出している状態で、急激な内視鏡のアングル操作をしないこと。
- (4)無理な力で挿入部先端を体腔内の組織に押し付けたり、急激にブラシをチューブから突き出さないこと。
- (5)本製品を内視鏡から勢いよく引き抜かないこと。

詳細は『取扱説明書』の「7 仕様」、「8 保管」、「9 使用法」、「10 廃棄」を参照すること。

不具合

その他の不具合

機器の破損、異物の脱落、機能の低下

有害事象

その他の有害事象

感染、皮膚・組織の炎症、穿孔、大出血、粘膜損傷、咳嗽

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

詳細は『取扱説明書』の「8 保管」を参照すること。

有効期間

滅菌パックに表示された使用期限を確認すること。
(自己認証(当社データ)による)

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先
TEL 0120-41-7149 (内視鏡お客様相談センター)

取扱説明書を必ずご参照ください。