

BL フィルター MAJ-2544

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

1. 構成


本品は以下のものから構成されている。

・ BL フィルター

MAJ-2544

2. 主要部分名称

フィルター部

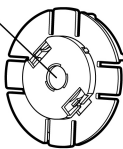

ボス部



3. 仕様

組み合わせ可能なカメラヘッド

CH-S700-08-LB

組み合わせ可能な内視鏡とライトガイドケーブルは OTV-S700 アップグレードパック BL (MAJ-2513) のマニュアルを参照すること。

作動・動作原理

青色光観察の際に硬性鏡とカメラヘッドの間に取り付ける。青色光観察と白色光観察の両立が可能なレベルで内視鏡から得た青色領域の光を軽減しカメラヘッドへ挿通する。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、硬性鏡およびカメラヘッドに接続する青色光観察機能追加用パーツである。青色光観察および白色光観察を行うために、青色光観察と白色光観察の両立が可能なレベルで内視鏡から得た青色領域の光を軽減しカメラヘッドへ伝達する。

【使用方法等】

使用方法

- 滅菌パックの点検をする。
- BL フィルター外観の点検をする。
- BL フィルターのボス部を、カメラヘッドのスコープマウントにはめ込み、取り付ける。
- カメラヘッドに内視鏡を取り付ける。
- 必要に応じて、青色光観察を可能にするためにビデオシステムセンターにある BL 観察モードを ON に設定する。
- 通常光観察画像および BL 観察画像が正常に映ることを確認し、内視鏡検査を行う。
- 内視鏡検査終了後、BL フィルターを取りはずし、適切な方法で廃棄する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- BL フィルターは滅菌済み製品のため手袋を着用して取り扱うこと。水などが付着した手袋で、BL フィルターを取り扱わないこと。フィルター部に水などが付着すると機能が確保できないおそれがあります。
- 仕様に記載したカメラヘッドや内視鏡との組み合わせで使用する。正常に機能しないだけでなく、機器を破損したり、患者および術者を傷付けたりするおそれがあります。
- 滅菌パックに破れ、シール部のはがれ、水などによるぬれが発生するおそれのある場所に保管しないこと。
- 滅菌パックに記載されている使用期限を過ぎた BL フィルターは使用しないこと。
- 滅菌パックに破れ、シール部のはがれ、水などによるぬれなどの異常がないことを確認すること。滅菌パックに異常が見つかった場合には無菌状態が保たれていないため使用しないこと。
- 変形や割れなどの異常がある BL フィルターは使用しないこと。機能が確保できないおそれがあります。
- カメラヘッドを内視鏡に接続する際は、以下の事項を厳守すること。
 - 接続前に、内視鏡のアイピースに緩みがないことを確認すること。
 - 接続後に、内視鏡とカメラヘッドの接続にがたつきがなく、しっかりと固定されていることを確認すること。
- 使用が終了した本製品は適切な方法で廃棄すること。
- 本製品は再滅菌、再使用しないこと。

不具合

その他の不具合

画像異常、機器の破損

有害事象

その他の有害事象

感染

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

本製品は常温、常湿で X 線、紫外線、直射日光の当たらない清潔な場所に保管すること。

有効期間

滅菌パックに表示された使用期限を確認すること。
(自己認証(当社データ)による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149 (内視鏡お客様相談センター)

取扱説明書を必ずご参照ください。