

医04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

エレバン

再使用禁止


(滅菌済医療機器)

**【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

- ** 粘着テープ: ポリ塩化ビニル製フィルム、アクリル系粘着剤
- パッド: 不織布、ポリエチレンネット
- * セパレータ: 紙

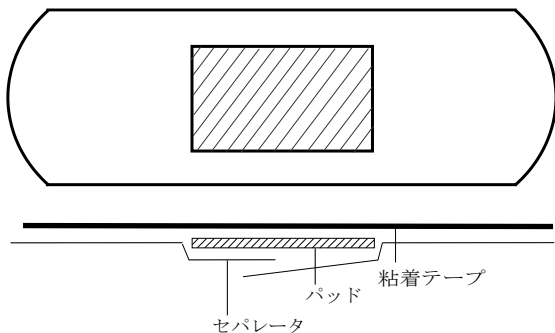

種類	サイズ	1箱入数
No.100M	19mm×72mm	100枚
No.200M	19mm×72mm	200枚
No.300L	25mm×72mm	100枚

【使用目的又は効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷面の被覆及び保護

【使用方法等】

傷口とその周辺を清潔にし、パッドに触れないようにして、セパレータをはぎ取り、パッドを傷口に当て粘着部分で皮膚に固定する。

**【使用上の注意】

・重要な基本的注意

1. 本品の使用は1回限り、再使用しないこと。
2. 滅菌済の為、個包装を破損しないように注意すること。
3. 包装開封後、速やかに使用すること。
4. 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。
5. 1日に2～3回貼り替えること。
6. パッド部分の濡れ、汚れは傷の治りが悪くなる場合があるので貼り替えること。
7. 粘着面を傷口に貼らないこと。
8. 本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等があらわれた場合は使用を中止すること。
9. 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。


2. 有効期間

* 本品の容器に記載

[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

 阿蘇製薬株式会社

〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼91-1

TEL 03-5422-3365