

*2021年 3月改訂（第2版）
2020年 12月作成（第1版）

医療機器届出番号 25B3X10005000009

医療用品（4）整形用品
一般医療機器 医療用不織布
JMDNコード 34655000

ハクゾウラップキュアドレッシング

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


パッド：脱脂綿の両面にポリエチレンフィルム

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

傷口を清潔にして、ロール状のものから必要な寸法を切り取ったパッドを傷口にあてて、絆創膏などで固定する。

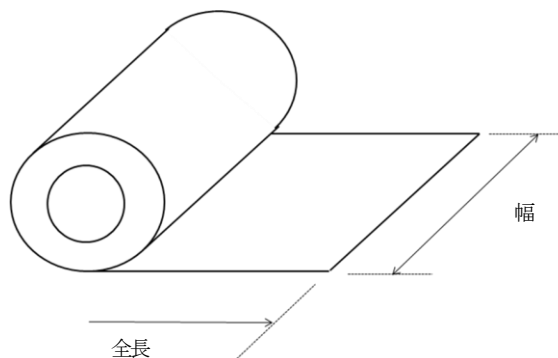

* 【使用上の注意】

・重要な基本的注意

1. パッドが汚れたり水にぬれた時は、新しいものに貼りかえること。
2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
3. 本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止すること。
4. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

* 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ピアック株式会社

〒523-0051 滋賀県近江八幡市八木町 359

・販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

<https://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)