

2017年 11月改訂 (第2版)  
2015年 2月改訂 (第1版)

届出番号 27B2X0003800017

医療用品(4) 整形用品 JMDNコード34864000  
一般医療機器 救急絆創膏  
**フィルフィックス20**

再使用禁止

---

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

粘着テープ: ポリウレタン、アクリル系粘着剤  
本品は滅菌済みである。

**【使用目的又は効果】**

創傷面の保護

**【使用方法等】**

使用部位を清潔にして穿刺部の周辺を粘着テープで固定して使用してください。

**【使用上の注意】**

使用部位とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って使用してください。水気があるとつきにくい場合があります。

皮膚の弱い方は同じところに繰り返し貼らないでください。

穿刺部から滲出液や出血が見られる場合は使用しないでください。

明らかに感染を有している部位には使用しないでください。貼付部位は感染症・皮膚障害等の徴候及び本品の破れ・浮き等があるかどうか確認するため毎日観察してください。本品の使用により、感染症及び皮膚障害(発疹・発赤・かゆみ等)と思われる症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。

滅菌効果が損なわれますので、滅菌袋は使用時に開封してください。

包装が破損または汚損している場合は、滅菌効果が損なわれますので使用しないでください。

剥がす際は、皮膚障害やカテーテルの抜去を防ぐため、皮膚やカテーテルを押さえながらゆっくり剥がしてください。

**【保管方法及び有効期間等】**

直射日光が当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

小児の手の届かない所に保管してください。

使用期限: 包装袋及び個装箱に記載  
製造日より、3年間

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

〔製造販売者〕 株式会社 共和  
大阪府泉佐野市鶴原4-4-81

〔お客様相談窓口〕 TEL 06-6658-7111