

医療用品(05)副本
一般医療機器 手・指用副本 16210000

ショールマキツメクリップ

【警告】

糖尿病と診断され方は、医師にご相談ください。
（糖尿病と診断された患者に本品を使用する場合は、慎重に局所管理をすること。）[重篤な有害事象が発現する恐れがある。]


【禁忌・禁止】

以下の症状、疾患をお持ちの方[重篤な有害事象が発現する恐れがある為]
・ 本品の材料に過敏症またはアレルギーのある方。
・ 重篤な糖尿病や重度な血行障害のある方。
・ 足、手指の爪に感染症の症状がある方。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

平らなクリップで変形力と矯正力に富んだ形状記憶合金製の固定材料である。

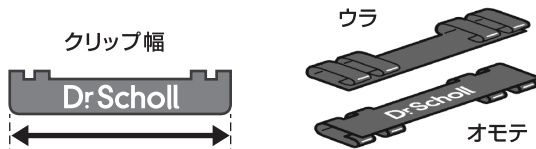

サイズ	クリップ幅
S	14.5 mm
M	16.5 mm
L	18.5 mm

2. 原材料

銅、アルミニウム、マンガン合金

3. 原理

復元力に富む本品を湾曲した爪に装着することにより痛みを軽減する。

【使用目的又は効果】

皮膚の損傷や痛みを起こす可能性の高い巻き爪や変形爪の方に対して、爪に装着して痛みの軽減や変形爪や巻き爪の改善を目的として使用する器具である。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 患部(爪の大きさ)に応じて適切なサイズの本品を選定する。
- 爪が本品を装着できるだけ伸びている事を確認した後、装着したい周辺部を清潔にし、十分に乾燥させる。
- 巻き爪となっている指の爪にクリップの左右のフックを片方ずつゆっくり挿し込む。

4) クリップがしっかりと固定されたか確認する。

5) クリップの脱落を防止する為、爪とクリップをテープでしっかりと固定する。その際、テープを強く巻き付けたりせずに、上から貼ってクリップと爪を固定する。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 巻き込みが強い場合は、左右どちらかに寄せて使用する。
- 爪が厚い場合は、爪をやすりなどで薄く削り使用する。
- 爪が短くフックがかけられない場合は、爪が伸びてから使用する。(目安: 2~3mm 程度)
- テープ等を強く巻き付けたり、指全体を覆わない。
[循環障害や神経障害が起こる可能性がある為]
- 固定に使用したテープが濡れたり湿った場合は、取り替える。
[皮膚のかぶれ等を起こす場合がある為]
- 本品の装着中はクリップを圧迫する靴は避ける。
- クリップで巻き爪の状態が改善した場合でも、使用を中止すると爪が元の形に戻る場合がある。
- 本品で靴下やストッキングを破る可能性があるので注意する。
- 運動時、サウナ・入浴・温泉等に入る時は、クリップを取り外すこと。
- 取り外したクリップを再度使用する場合は、再び使用方法に準じ適用する。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の方は慎重に適用すること）

- 糖尿病と診断された方。
[有害事象が発現する恐れがある為]
- 爪が皮膚に食い込み皮膚障害がある方。
[症状を悪化させるおそれがある為]
- 爪が弱い(薄いなど)、爪が割れる方。

2. 重要な基本的注意

- 以下の場合は、直ちに使用を中止し医療機関に連絡をする。
必要であれば適切な処置を受ける。
① 本品の使用中に、痛み・刺激・違和感・かぶれなどの異常がある場合。
② 入浴後、爪が柔らかくなり矯正効果が強くなった為患部に異常を感じた場合。
- 巻き爪の状態や使用状況によって、クリップの使用期間が異なる。爪の状況にあわせて、新しいクリップに交換する。
- フックが折れたクリップは、効果が発揮できないので使用しない。
- 本品をはさみで切るなどの加工、修理を行わない。

【保管方法及び有効期間等】

- 水ぬれ、高温多湿及び直射日光を避け、清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者： レキットベンキーズ・ジャパン株式会社
東京都品川区東五反田3-20-14
お客様相談室 0120-634-434

製造業者： 株式会社古河テクノマテリアル