

医 療 用 洗 浄 器
鼻用洗浄器 一般医療機器 JMDN 41599000

カイゲン鼻洗浄スプレー G

【禁忌・禁止】

- (1) 鼻の炎症のひどい時は、使用を避けてください。
- (2) 鼻腔内の洗浄にのみ使用し、目や耳に使用しないでください。

【操作方法又は使用方法等】

- ① カバーキャップを外して、ノズルボタンに指のはらをのせます。
- ② ノズルの先を鼻腔にそっと入れて噴霧してください。
- ③ もう一方の鼻腔も同様に洗浄します。使用后、軽く鼻をかんでください。
- ④ ノズルの先をティッシュ等でふき取り、清潔に保管してください。

〈使用方法に関する注意〉

- (1) 容器は振らないでください。また、横にしたり、逆さにして使用しないでください。
- (2) ノズルボタンを押すと、洗浄液が均一に噴霧され鼻の中を洗い流します。液が落ちてくる恐れがありますので、ハンカチ等で受け、洋服が濡れないよう注意して、ご使用ください。

【使用上の注意】

- (1) 耳鼻咽喉科で治療を受けている方は、使用前に医師に相談してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導のもとに使用させてください。
- (3) 使用中に万一異常が生じた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。

【取扱い上の注意】

- (1) 小児の手の届かない場所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たる場所やファンヒーター等の暖房器具の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないでください。
- (3) 捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押して、ガスを抜いてください。
- (4) 横向きや逆さまでの保管は避けてください。

【包装】 200mL

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元	小池化学株式会社 埼玉県鴻巣市袋882 TEL：048-548-2111
製 造 元	小池化学株式会社 東京都墨田区錦糸3-2-1
発 売 元	カイゲンファーマ株式会社 大阪市中央区道修町2-5-14

商品お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。

カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室

TEL：06-6202-8911

受付時間：9：00～17：00
(土、日、祝日を除く)