

2023 年 4 月作成（第 1 版）

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 アイパッド 11661000
貼 れ る 眼 帯 (50P)

再使用禁止

滅菌済

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品はポリエチレンネット付不織布（ポリエステル、レーヨン及びポリプロピレン）をアクリル系粘着剤又は脂肪酸エステル含有アクリル系粘着剤の塗工されたポリエステル不織布テープに貼付した整形用品です。セパレーターには、シリコーン樹脂のついた紙を使用しています。
- 本品は左右両用です。

【 使用目的又は効果 】

- ガーゼ又は綿等の様々な材料で製造されたパッドからなる器具です。眼の保護又は分泌物の吸収に用いることを目的としています。

【 使用方法等 】

- 眼の周りを清潔にし、剥離紙を剥がしパッド部分を眼に当て、テープで固定してください。

【 使用上の注意 】

- 開封後は直ちに使用してください。
- 粘着テープ部分を傷や湿疹、かぶれ等の患部に貼らないでください。
- 発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 滅菌袋が開封・破損している場合は使用しないでください。
- 本品はパッドの左右及び下方向に粘着面があります。貼付する場合、粘着部分は眼の左右及び下部の3点にお貼りください。上部の眉毛の部分は粘着部分がありません。
- 皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼り付けたり、急激に剥がしたりしないでください。
- 本品使用中の歩行や階段の昇り降りには注意してください。また、自転車、自動車等の運転はおやめください。
- 使用後は感染防止に留意し処理してください。
- 斜視・弱視訓練用ではありません。

【 保管方法及び有効期間等 】

1、保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。

2、使用期限（耐用期間）

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝日を除く）