

一般医療機器 医04 整形用品 13705000 X線造影材入りスポンジ

白十字オパーゼX

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・滅菌は一度限りとする事 / 体内に留置しない事

X線造影材部分をつかまない事 / ガーゼやX線造影材に強い負荷がかからないように使用すること

(X線造影材を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがある)

【形状・構造及び原理等】

綿100%の平織りガーゼ数枚を重ね、綿100%の糸で縫製したもの

通常は4角形で、その1角に体内残留を防ぐ目的で綿テープを取りつけてあるものもある

体内残留防止のためX線造影用の糸を1本以上含有している

X線造影材: スチレン系樹脂に硫酸バリウムを配合し、糸状にしたもの(わかりやすいように有色としてある)

【使用目的又は効果】

X線で検知可能な成分を含有するもので、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする

【使用方法等】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること

滅菌方法はX線造影材がスチレン系樹脂のため、エチレンオキシドガス滅菌を推奨 電子線滅菌等のその他滅菌方法は、データ不足により不可 *蒸気滅菌の場合には、135度、15分以下で滅菌すること

患者の体内への遺残を防止するため、手術前に使用する本品の数を確認し、手術終了時の縫合前にも必ず再度本品の数を確認すること

縫合前にはレントゲン写真の撮影を行い、術野のX線造影材像を確かめガーゼの遺残がないことを確認すること

*もし数量が合わないようであれば、レントゲン写真を撮影角度を変えるなどして複数枚撮影し、X線造影材像を確認すること

【使用上の注意】

体内に残らないように使用すること

X線造影材の強度が低下するため、滅菌は一度限りとし再滅菌は行わないこと

ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

*本品の使用期限は包装に記載[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

*<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ(お客様相談室) TEL 0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)