

送水タンク MAJ-1603

【形状・構造及び原理等】


**構造・構成ユニット

1.構成

・送水タンク MAJ-1603

*2.各部の名称

★は、使用中生体粘膜等に触れる部分である。

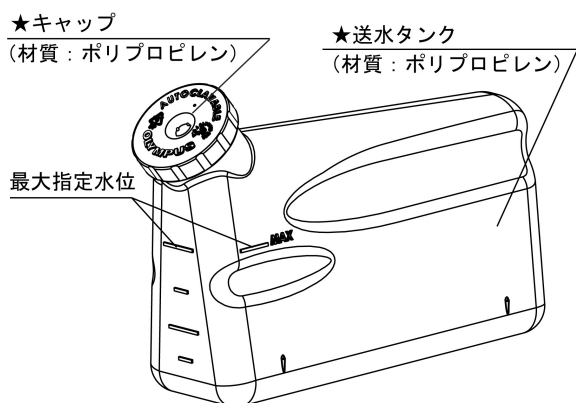

*3.仕様

*奥行き	:	*320mm
*幅	:	*87mm
*高さ	:	*205mm
*容量	:	*2000ml

作動・動作原理

*本製品は、当社指定の内視鏡用送水装置、または内視鏡用送気送水装置に接続して、体腔内に送液するための貯水タンクである。

*【使用目的又は効果】

使用目的

*本品は、当社指定の内視鏡用送水装置、または内視鏡用送気送水装置と組み合わせて、体腔内に送液するために貯水することを目的とする。

***【使用方法等】

1.洗浄、滅菌

決められた方法で洗浄、滅菌を行う。

詳しくは、『取扱説明書』「第5章 洗浄、滅菌」を参照すること。

*2.滅菌水、脱気水、または生理食塩液の注入

(1)送水タンクの指定水位まで滅菌水、脱気水、または生理食塩液を入れる。

(2)キャップを送水タンクに締め付ける。

*3.内視鏡用送水装置、または内視鏡用送気送水装置への接続

*当社指定の内視鏡用送水装置、または内視鏡用送気送水装置に取り付ける。

4.洗浄、滅菌

*使用後は、内視鏡用送水装置、または内視鏡用送気送水装置から取り外し、1項と同様に洗浄、滅菌を行う。

使用方法等に関連する使用上の注意

- 1.内視鏡と組み合わせて使用する場合は、必ず滅菌水、脱気水を使用すること。
- 2.内視鏡用処置具と組み合わせて使用する場合は、必ず生理食塩液を使用すること。
- 3.送液時は、常に滅菌水、脱気水、または生理食塩液の残量を確認し、空気を送気しないようにすること。

【使用上の注意】

**重要な基本的注意

- 1.本製品は、出荷前に洗浄、滅菌されていない。洗浄、滅菌せずに使用すると感染するおそれがある。
- 2.必ず使用前に滅菌し、毎日交換すること。
- 3.本製品を光源装置などの機器の熱源から十分に遠ざける、または、排気される温風にさらされない位置に配置すること。本製品を内視鏡光源装置からの排気などの温風に長時間さらされる環境に置いた場合、もしくは近接した機器などの遮へい物などにより熱気がこもる環境に長時間置いた場合、送水タンク内の滅菌水、脱気水、または生理食塩液が高温となることがある。高温となった滅菌水、脱気水、または生理食塩液を使用した場合、患者がやけどを負うおそれがある。
- 4.送水タンクの洗浄、滅菌は、必ず送水タンクからキャップを取り外して行うこと。
- 5.指定条件以外で高圧蒸気滅菌を行わないこと。指定条件以外の方法で高圧蒸気滅菌を行うと、機器に損傷を与えるおそれがある。

**不具合

その他の不具合

故障、破損

**有害事象

その他の有害事象

やけど、感染

【保管方法及び有効期間等】

**保管方法

使用後は、『取扱説明書』「第 6 章 手入れ、保管、廃棄」に従い保管すること。

**耐用期間

*本製品は、消耗品（修理不可能）である。本添付文書や『取扱説明書』に示す使用前点検および定期点検を実施し、点検結果により必要であれば新品と交換すること。

**【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 洗浄・滅菌

- (1) 初回使用前、使用後には洗浄、滅菌すること。
詳しくは『取扱説明書』「第 5 章 洗浄、滅菌」を参照すること。
- (2) 使用前には、点検を実施すること。
詳しくは『取扱説明書』「第 7 章 保守および修理」参照すること。

2. 保守・点検

- (1) 機器および部品は必ず定期点検を行うこと。
- (2) 本製品をしばらく使用しなかった場合は、使用前に本製品が正常かつ安全に作動することを確認すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

外国製造元：

キーメド（メディカル アンド インダストリアル イクイップメント）

***KeyMed (Medical & Industrial Equipment)**
国名：イギリス／UK

取扱説明書を必ずご参照ください。