

副送水チャンネル用チューブ MAJ-1608

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

1. 構成


- ・副送水チャンネル用チューブ MAJ-1608
- ・ピンチクランプ

2. 包装

- 副送水チャンネル用チューブ MAJ-1608
- 50 個/単位、または 10 個/単位

3. 各部の名称

★は、使用中に生体粘膜等に触れる部分である。

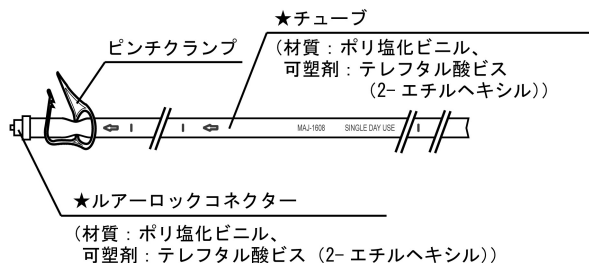

4. 仕様

(1) 寸法

全長 750mm

(2) 特徴

1) 1 日ごとに廃棄する製品

**2) EOG 滅菌品

作動・動作原理

本品のルアーロックコネクタを副送水チューブ (MAJ-855) に接続し、もう一方に接続した内視鏡用送水装置から送水する。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、当社指定の内視鏡用送水装置と組み合わせて、滅菌水 (または脱気水) を送水することを目的とする。

【使用方法等】

1. 点検

滅菌パックの点検、本製品の外観の点検を行い、異常がないことを確認する。

2. 機器の準備、操作

- (1) 当社指定の内視鏡用送水装置を設置、準備する。
- (2) 副送水チューブに本製品のルアーロックコネクタを接続し、もう一方を内視鏡用送水装置の送水タンクに接続する。
- (3) 内視鏡用送水装置を操作して送水を行う。
- (4) 副送水チューブを取り外す際には、付属のピンチクランプを閉める。

3. 本製品の取りはずし方法

内視鏡検査終了後、副送水チューブと内視鏡用送水装置から本製品を取りはずす。

4. 廃棄

使用後、本製品を適切な方法で廃棄する。

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 本製品が副送水チューブに確実に取り付けられている状態で使用すること。確実に取り付けられていないと送水機能の低下をもたらすだけでなく、患者の体液を含む可能性のある水が漏れたり、噴出するおそれがある。
2. 本製品を使用して送水するときは、必ず滅菌水 (または脱気水) を使用すること。上記以外の洗浄液を使用すると、患者に感染するおそれがある。
3. 送水開始時は、内視鏡用送水装置の流量設定を最小にし、患者の状態や必要な洗浄にあう程度まで徐々に引き上げること。
4. 副送水チューブを取り外す際には、付属のピンチクランプを閉めること。検査の合間に水漏れが起きるおそれがある。
5. 患者の体内に挿入されている内視鏡に内視鏡用送水装置を接続しているときは、ポンプヘッドレバーを開けないこと。また、内視鏡用送水装置を患者より低い位置にすること。患者の体内へ意図しない送水が行われるおそれがある。
6. 使用中に送水されなくなった場合は、内視鏡用送水装置の電源スイッチを切り、内視鏡用送水装置の『取扱説明書』に記載された取りはずし手順を参照して、管路内を安全に減圧すること。減圧しないと、特に内視鏡の管路内に汚物などが詰まっている場合などに、患者の体液を含む可能性のある水が漏れたり、噴出するおそれがある。
7. 本製品から副送水チューブを取りはずす際は、必ず送水タンクよりも高い位置で作業を行うこと。本製品の内部に溜まった滅菌水が全て流れ出てくるおそれがある。

【使用上の注意】

**重要な基本的注意

1. 本製品を再滅菌しないこと。
2. 使用前に、全てのチューブの接続部から水漏れのないことを確認すること。
3. 本製品以外の送水チューブは使用しないこと。患者の体内へ意図しない圧力の送水がされるおそれがある。
4. 送水タンクを滅菌水 (超音波製品を使用する場合は脱気水) で満たし、内視鏡を介して送水できることを確認すること。送水できない場合は、使用する内視鏡の『取扱説明書』にしたがって、代替の送水方法を実施すること。
5. 本製品は、使い捨て製品であるため 1 日ごとに交換すること。本製品を翌日に再使用すると、感染源となる危険があり、組織の炎症や異常を引き起こすおそれがある。

不具合

その他の不具合

水漏れ

有害事象

その他の有害事象

感染、組織の炎症や異常

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1.水ぬれに注意し、常温、常湿でかつ直射日光の当たらない清潔な場所に保管すること。
- 2.滅菌パックに異常が発生するおそれのある場所には保管しないこと。

有効期間

本製品は 1 日の症例後に必ず交換する。滅菌パックに表示された使用期限を確認すること。（自己認証（当社データ）による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

外国製造元：

キーメド（メディカル アンド インダストリアル イクイップメント）
KeyMed (Medical & Industrial Equipment)
国名：イギリス／UK

取扱説明書を必ずご参照ください。