

スピーディ カテ コンパクト（男性用）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

尿道へ挿入される部分に親水性コーティングが施された導尿用カテーテルであり、滅菌包装内にはポリエチレングリコール等張液が封入されている。カテーテルの先端は閉じており、2つの側孔がある。カテーテルは入れ子状に包装されており、使用時に引き伸ばされる。尿道経由で膀胱に挿入し、間歇導尿に用いる。また、患者自身による間歇自己導尿に用いることができる。

<構造図>



・滅菌包装



カテーテルAの材質：ポリウレタン

カテーテルBの材質：MABS

(メチルメタクリレート ブタジエン・スチレン共重合体)

全長：33cm～34cm 有効長：30cm

カテーテルAの外径		カテーテルBの外径	
(mm)	(Fr/Ch)	(mm)	(Fr/Ch)
4.0	12	6.0	18


【使用目的又は効果】

膀胱内に挿入し、導尿、採尿等を行うための尿誘導用カテーテルである。


【使用方法等】

導入前の準備


- まず手洗いを行い、尿道口周辺を清拭します。これは、手や性器からカテーテルに細菌の混入を防ぐために重要です。
- カテーテルの包装を開封する前に、その他の導尿の準備が済んでいるかを確認してください。
- 包装のふたを上にして、垂直に持ち、ふたをひねって開封してください。
- ふたは手の届くところに残しておいてください。

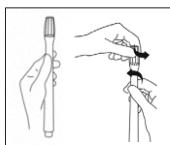

- 排尿用ファネルを引っ張ってカテーテルを引き出してください。
- カテーテル（カテーテルA及びカテーテルB）をカチッと音がしてロックされるまで引き出してください。これでカテーテルの準備は完了です。
- 排尿用ファネルだけを持って、カテーテルの表面に触れないでください。また、カテーテルが折れないように注意してください。

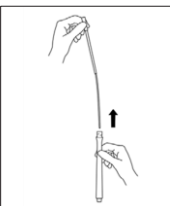



- 出来れば、包装内に残った液体はトイレ又は流しに捨ててください。

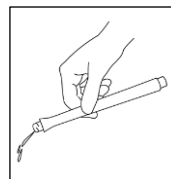

*自己導尿の場合

カテーテル挿入

- 片手でペニスを持ち上げ、尿道がまっすぐになるように保持してください。
- 導尿中にペニスを強く握らないでください。
- 尿が流出するまで、カテーテルをゆっくりと尿道内に挿入してください。
- 導尿中は排尿用ファネルをしっかりと持ち、カテーテルが尿道内に留まるようにしてください。
- 尿の流出が止まったら、カテーテルを 1-2cm 抜いてください。
- 尿が再び出始めた場合、数秒待ったのち、カテーテルを 1-2cm 抜いてください。
- 膀胱が空になったら、ゆっくりとカテーテルを抜いてください。
- カテーテル使用後は、元の包装内へ押し戻してください。ふたで押さえて、そのまま廃棄してください。

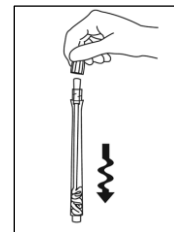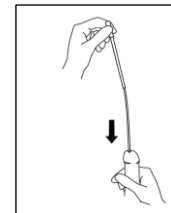

*介助導尿の場合

- ペニスを患者の腹側に向けて持ちあげてください。このポジションがカテーテルの尿道への挿入を容易にします。
- ペニスの上部先端を両側からやさしく握って尿道口を開き、コネクターを持って、カテーテルを尿道にゆっくりと挿入してください。
- 尿が流出し始めるまで、カテーテルの挿入を続けてください。
- 導尿中は排尿用ファネルをしっかりと持ち、カテーテルが尿道内に留まるようにしてください。
- 尿の流出が止まったら、カテーテルを 1-2cm 抜いてください。
- 尿が再び出始めた場合、数秒待ったのち、カテーテルを 1-2cm 抜いてください。
- 膀胱が空になったら、ゆっくりとカテーテルを抜いてください。
- カテーテル使用後は、元の包装内へ押し戻してください。ふたで押さえて、そのまま廃棄してください。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 本品を在宅等で患者若しくは家族が使用する場合に、本品の使用方法及び使用上の注意について医療従事者が指導を行ってください。
 - 従来と同様の方法で導尿したにも関わらず、膀胱からの尿の流出が見られない場合には受診するよう、患者へ指導を行ってください。
 - 尿道狭窄と診断されたことがある場合には申し出るよう、患者へ指導を行ってください。
- * 本製品は、ラテックス製ではありませんが、製造及び包装工程で微量のラテックス混入の可能性がありますので、アレルギーのある方のご使用はご注意ください。

2. 不具合、有害事象
 - その他の有害事象
 - ・ 発熱
 - ・ 膀胱を空にするときの不快感
 - ・ 頻回の尿意切迫感
 - ・ 血尿
3. その他の注意
 - 開封後は速やかに導尿を行って下さい。
 - 包装内の液体はしみや汚れになることがあります。
 - 単回使用製品の再使用は、患者へのリスクを高める可能性があります。
 - 再処理、再消毒及び再滅菌は、患者への感染、医療従事者への追加リスクの可能性があります。
 - 本品は特に男性の為にデザインされた製品です。

【保管方法及び使用期間等】

1. 保管の条件
直射日光及び高温多湿、凍結を避けて保管すること。
2. 使用の期限
直接の包装及び外箱を参照(自己認証による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者
コロプラスト株式会社
住所：東京都千代田区九段 2-1-30 イタリア文化会館ビル

** 製品問い合わせ窓口
コロプラスト サポートライン
0120-56-1515

製造業者
Coloplast A/S (コロプラスト社)
国名：デンマーク

