

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 穿孔器 12989001

ティッシュパンチ

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品には、寸法の違いにより以下の種類がある。

(単位：mm)

形 状	全長	径
	27.0	3.5
		4.0
		4.5
		5.0
		6.0

【体に接触する部分の主な組成】

ステンレス鋼

【原理】

本品を歯科用ハンドピースに接続して使用する。

【使用目的又は効果】

軟組織を貫通させるために用いる。

【使用方法等】**/*

【使用方法】

- (1) 本品を歯科用ハンドピースに接続する。
- (2) インプラント埋入部の歯肉を除去(パンチアウト) する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 20 rpm 以下の回転数で使用すること。
- (3) 使用前に、回転させて振れがないことを確認すること。
- (4) 破損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【保守・点検に係る事項】**

【清掃・洗浄】

- (1) 清掃にはナイロンブラシを使用し、ワイヤブラシ等は使用しないこと。
- (2) 塩素含有量の高い洗浄剤・消毒剤、及びシュウ酸入りの洗浄剤・消毒剤は使用しないこと。

【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社モリタ

電 話 番 号：06-6380-2525

外国製造業者：トーマン メディカル AG
Thommen Medical AG

国 名：スイス

【お問い合わせ先】

問 合 せ 窓 口：株式会社モリタ お客様相談センター

電 話 番 号：0800-222-8020（無料）

F a x 番 号：0800-222-6480（無料）

E - m a i l：e-customer@morita.com