

ショルダーハーネス SHK-1

【形状・構造及び原理等】

1. 構成及び外観



2. 原理

ベルトを体に装着し本体を脇に抱えることによって、肩腱板の外転位を維持する。

【使用目的又は効果】

肩腱板断裂術後の患者が脇を上げた状態(外転位)を無理なく維持できる。

【使用方法等】

1. 基本的な使用方法

1) 外転位の調整

- (1) ショルダーベルトのバックルでベルトの長さを調整することにより脇の間にある本体の高さが変わり、外転位の調整が可能になる。
- (2) バックルでベルトの長さを調節する。

2) 上腕部の固定

アームベルトで上腕部を固定することで腕の逸脱を防止し、より安全に外転位が保持できる。

3) 補助ベルトの利用(腕の状態保持が必要な場合)

- (1) 補助ベルトの輪がアームベルトと同じ向きになるようにショルダーベルトに対して十字に装着しホックを留める。
- (2) ベルトの先をベルトループに通す。
- (3) 手首を補助ベルトに通す。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- ・出荷時は右腕固定用に組み立てているため、左腕固定の場合は分解・組立方法にならって左腕固定にしてから使用すること。(分解・組立方法は取扱説明書を参照すること。)
- ・腕を上げた状態(外転位)が適切な位置であることを確認してから使用すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・ベルト等にゆるみ、破損があった場合、ただちに使用を中止し、ベルトを調節または交換すること。
- ・本品使用中に腕を上げた状態(外転位)が適切な位置でないことが分かった場合には、ただちに使用を中止し、ベルトの長さを調節すること。

2. 不具合・有害事象

- ・発赤、かゆみ

【保管方法及び有効期間等】

1) 貯蔵・保管方法

直射日光及び火気を避け、常温で湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2) 耐用年数等

販売後 1 年。(自社基準)

【保守・点検に係る事項】

- ・汚れた場合は水洗い(中性洗剤可)の後、水分を拭き取り、消毒乾燥すること。

取扱説明書を必ず参照すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

RACCOON

【製造販売業者】三田理化工業株式会社

連絡先: 消耗品営業 G

電話番号 06-6458-0971 FAX 番号 06-6458-2393

【製造業】三田理化工業株式会社

連絡先: 開発センター

電話番号: 0795-28-4354