

医療用品(4)整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 (JMDNコード:34864000)

ハイドロ ジェントルエイド

再使用禁止

** 【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
再使用禁止(一度使用したものを再使用しないでください。)

** 【形状・構造及び原理等】

1.形状及び構造

本品は高い水蒸気透過性を持ち、外からの液体や細菌等の侵入を防ぐことができるポリウレタン製の背面フィルム層、皮膚・創傷面に接触するシリコーンゲル粘着剤を塗布した穴の開いたポリウレタン製の創傷接触層、その中間に吸水性に富む親水性フォーム製の吸収パッド層を挟み込んだ3層構造の救急絆創膏です。創傷接触層はうら紙で保護されています。



サイズ・包装

製品番号	サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	枚/箱
66800833	5 x 5	3 x 3	10
66800834	7.5 x 7.5	5 x 5	10
66800835	10 x 10	7.5 x 7.5	10
66800836	5.5 x 12	3 x 9.5	10
66800837	8 x 15	5.5 x 12.5	10
66800840	15 x 15	12.5 x 12.5	10
66801012	10 x 20	7.2 x 17.2	10
33000157	5 x 5	3 x 3	3
33000158	7.5 x 7.5	5 x 5	3
33000159	10 x 10	7.5 x 7.5	3

2.機能及び動作原理

本品は吸収パッドでキズからの滲出液(しんじゅつえき:キズから出る体液)を吸収・保持し、さらに液体や細菌等の侵入を防ぐ防水性の背面フィルムにより、外部からの感染や汚染を防止する機能も持ち合わせた救急絆創膏です。

【使用目的又は効果】

傷及び周囲皮膚の被覆及び保護

** 【使用方法等】

本品は、1 回限りの使用のみで再使用はできません。

1.キズを手当する前後に手を洗ってください。キズとその周囲の皮膚を水道水等でやさしく洗浄し、目に見える汚れやごみを取り除いてください。

- 2.キズの周りの皮膚を清潔にして、乾燥させて、キズ近くの余分な毛を除毛してください。
- 3.貼る前に、本品の吸収パッドがキズ又は保護すべき部位全体を覆うことができるサイズか確認してください。
- 4.本品を滅菌袋から取り出してください。
- 5.本品の 1 枚のうら紙をはがし、粘着剤の付してある白色面をキズに直接貼ってください。
- 6.本品をキズになじませて、残りのうら紙をはがしてください。
- 7.しわにならないように本品をキズとその周囲に密着させ、キズの全体に密着しているか確認してください。うまく貼れていない場合は、必要に応じて貼りなおしてください。
- 8.本品はより小さなキズや貼りにくい場所に合わせて切って使用することができます。切った場合、細菌の侵入を防ぐ性能と防水性が損なわれます。切った場合、フォームが露出した部分は適切なテープ等で覆ってください。その際本品全体を覆わないようにしてください。
- 9.使用開始して初めの時期は頻繁に観察してください。本品の表面から滲出液の吸収状態が黒っぽい模様のように観察できるので、パッドの端から約 0.5cm のところまで滲出液が広がった時を目安に交換してください。また、滲出液の吸収状態に関わらず 7 日間を限度として交換してください。
- 10.本品をはがす時は、隅を持ち上げ、キズから完全にはがれるまでゆっくりとはがしてください。

【使用上の注意】

- ** 1. 重要な基本的注意
- 1) 感染した(うんでいる)キズに使用する場合は、医師の指導の下、感染管理を受ける必要があります。
 - 2) 本品の使用中に、キズ周囲の皮膚に本品が原因と考えられる感染の症状(うんでいる、痛み、腫れや熱、発赤)が起きた場合には使用を中止し、医師に相談して適切な治療を受けてください。
 - 3) 本品使用中に皮膚障害、発疹・発赤、かゆみ等のアレルギー反応と思われる症状が現れた場合には使用を中止し、医師に相談して適切な治療を受けてください。
 - 4) 鼻や口付近で本品を使用する場合は湿気の蓄積により密着性に影響を及ぼし、本品がずれる可能性があるため注意してください。
 - 5) シャワーを浴びる際は、本品が濡れないように注意してください。直接噴霧したり、水没させたりしないでください。
 - 6) 低粘着の粘着剤が使用されているため、他の医療機器等を患者に固定するために本品を使用しないでください。
- ** 2. 不具合・有害事象
- 1) その他の不具合: 有害事象
本品の使用に伴い、以下の有害事象が発生する場合があります。
一般的な救急絆創膏の使用における有害事象
- ・キズの感染症状
 - ・キズ及び周囲の皮膚障害(かゆくなる、アレルギー反応、かぶれる、赤くなる、むくむ、水ぶくれができる、皮膚がはがれる)
 - ・キズの疼痛

**** 3. その他の注意**

- 1)本品は滅菌済みで、包装の破損等がない限り無菌性は保証されていますが、使用時に包装が破損又は汚損している場合には使用しないでください。
- 2)万が一、個包装内の製品に不良が見られた場合には使用しないでください。
- 3)本品は開封後、直ちに使用してください。
- 4)小児の手の届かないところに保管してください。
- 5)本品を再滅菌しないでください。

****【保管方法及び有効期間等】**

- 1.保管方法:直射日光を避けて、乾燥を保ち、換気された状態で、25℃を超えない環境下で保管してください。
- 2.有効期間:製造日より3年間 [自己認証(当社データ)による]
- 3.使用期限:製品包装に記載しています。
- 4.使用期間:1枚あたり最大7日間 [自己認証(当社データ)による]。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者:

スミス・アンド・ネフュー株式会社

TEL: 03-5403-8930