

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 開孔器 35517000


MMI バイトブロックST

再使用禁止

***【禁忌・禁止】**
〈使用方法〉
再使用禁止、再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

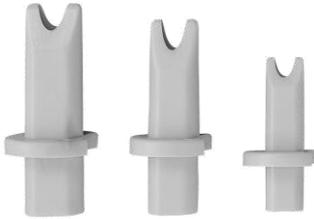

2. 原材料

ポリ塩化ビニル(可塑剤: フタル酸ジイソノニル)

3. 原理

筒の形状をしたブロック体で硬度に富んでおり、上下顎切歯間に挿入することで開口を維持する。内腔に気管チューブ等を留置しても、保護される。

【使用目的又は効果】

様々なサイズ、形状及び輪郭のものがある。挿入して開孔するときに開口部を拡張することができる。検査又は他の器具の挿入時に用いる。

*【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 患者の上下臼歯部を大きく開く。
- 2) 尖った方を上下顎切歯間に入れる。
- 3) 先端の溝が体の縦軸方向になるように留意しながら、中央部の出っ張り部分が歯の外側になるように留置する。
- 4) 本品がはずれたり、ずれたりしないようにテーピング等で、しっかりと固定する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 本品装着後は、意図した位置から脱落していないか、本品に損傷が起こっていないかの確認を常に怠らないこと。配置した位置等に異常がある場合は使用を中止すること【患者の呼吸を阻害する可能性がある】。
- 2) 適切なサイズを選択すること。
- 3) 患者の歯及び下顎の状態等に注意すること【本品をかむことにより、不具合を生じる可能性がある】。
- 4) 本品の交換手順や交換時期等について、院内基準の制定を推奨する。

**【使用上の注意】

重要な基本的注意

本品はMR Safeであり、一般的なMR検査による影響はない【自己認証による】。

*【保管方法及び有効期間等】

滅菌有効期間
3年【自己認証(当社データ)による】

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: **村中医療器株式会社**
TEL: 0725-53-5546



製造業者: パシフィック ホスピタル サプライ社 台湾
Pacific Hospital Supply Co., Ltd.